



ABENA®



INKONTINENZ &
PFLEGE

One-stop-shop

Inklusive
Beilage Tarifübersicht

Im Mittelpunkt stehen der Mensch, die Qualität und die Umwelt.

Dabei geht es vor allem darum, einfach und sorgfältig für mehr Lebensqualität zu sorgen.



Willkommen bei Abena

Personalisierte Gesundheitsversorgung bedeutet für uns, die individuellen Bedürfnisse zu kennen und die richtigen Lösungen zu finden. Wichtig ist hierfür, die optimale Kombination von Produkten zu wählen und sich mit ihrer Verwendung auszukennen.

Durch die jahrzehntelange Erfahrung als Anbieter von umfassenden Lösungen für die Gesundheitsversorgung haben wir ein Produktsortiment entwickelt, das für jeden die passenden Produkte bereithält – sowohl für den Patienten und das Pflegepersonal, als auch für die Einrichtungsleitung.

Ihr umfangreiches Nachschlagewerk

Dieser Katalog soll Ihnen einen Überblick über unser Sortiment geben, damit Sie schnell und unkompliziert Produkte finden und auswählen können.

- Übersichtliches Inhaltsverzeichnis mit allen Produktkonzepten und allgemeinen Informationen zu dem jeweiligen Konzept
- Übersichtliche Tabellen mit den wichtigsten Produktinformationen wie Artikelnummern, Farbcodes, Größen, Packungsgrößen usw. sowie allen relevanten Symbolen
- Ausführungen zu den jeweiligen Produktkonzepten mit weiteren Produktinformationen wie z. B. geltenden Vorschriften, Anwendungshinweisen, Gebrauchsanweisungen, aktuellen Expertentipps, neuesten Produktinformationen usw.

Kontaktieren Sie uns!
Produkt- und Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website
www.abena.at

Folgen Sie uns auf:



Because We Care – wir bieten die höchste Lebensqualität für die Benutzer unserer Einwegprodukte



Unser Ziel: Qualität

Die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Produkten und positiven Anwendungserfahrungen ist unser Versprechen an Sie.

Unser hauseigenes Labor prüft kontinuierlich die Saugfähigkeit, Haltbarkeit, Festigkeit und Qualität unserer Produkte. Durch enge Zusammenarbeit mit unabhängigen Laboren sowie Zertifizierungen und dem ständigen Fokus auf die Minimierung schädlicher Substanzen können Sie darauf vertrauen, dass unsere Produkte den strengsten Qualitäts- und Umweltstandards entsprechen.

Erfahren Sie mehr über die Qualität bei Abena unter www.abena.at



Von Experten vermitteltes Wissen

Nutzen Sie unseren Service. Online und mit Vertretungen in mehr als 90 Ländern stehen Ihnen unsere erfahrenen Experten schnell und unkompliziert zur Seite. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als umfassender Anbieter für verschiedene Kundensegmente im Gesundheitswesen haben wir umfangreiche Kenntnisse zu einer unserer Aufgaben gemacht. Unsere Mitarbeiter mit Erfahrung in der Pflege und die Produktspezialisten sind in alle Schritte involviert, von der Produktentwicklung bis hin zu den Anwenderschulungen in Pflegeeinrichtungen.



Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA

Umweltschutz hat für Abena oberste Priorität. Energieverbrauch, Abfallmanagement und CO₂-Ausstoß sind nur einige der Bereiche, auf die wir hier unser Augenmerk richten.

Als erster Hersteller von Inkontinenzprodukten, die mit dem Nordischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurden, erweitern wir kontinuierlich unser Sortiment an zertifizierten Produkten. 95 % der Abfälle aus unseren skandinavischen Produktionsstätten werden recycelt.



Das Nordische Umweltzeichen und das EU-Umweltzeichen sind weltweit für ihre strengen Anforderungen an

Gesundheit, Qualität und Umwelt anerkannt.



Mit mehr als 1200 Abena-Produkten, die das Nordische Umweltzeichen tragen, gibt es mit Sicherheit

ein umweltfreundliches Produkt für jeden Bedarf.



Angetrieben von Leidenschaft und Kreativität

Abena wurde schon immer von visionären Köpfen mit einer Leidenschaft für die Entwicklung innovativer Lösungen geleitet: angefangen bei der weltweit ersten intelligenten Inkontinenzversorgung für den täglichen Gebrauch, über ständige Innovationen bei den Produktionsmethoden, bis hin zu qualitativ hochwertigen Produkten – stets von Experten entwickelt.

Komplettlösungen für die individuelle Gesundheitsversorgung von morgen

Ein ganzheitlicher Ansatz bei der Gesundheitsversorgung berücksichtigt alle erdenklichen Bedürfnisse und konzentriert sich auf die Lebensqualität sowohl von Heimbewohnern, Pflegepersonal, Angestellten als auch von Angehörigen.

Mit unseren von Experten entwickelten Produktlösungen möchten wir bestmögliche Lebensqualität bieten, ohne dabei die Nachhaltigkeit aus dem Blick zu verlieren – für die Umwelt, die Gemeinschaft und die Qualität der Produkte und Lösungen.

Durch das umfassende Angebot ist Abena ein verlässlicher Partner für Lösungen aus einer Hand

Tausende von Produkten und neun Versorgungskonzepte decken jeden Bedarf ab und erleichtern die Auswahl der richtigen Produkte für den täglichen Pflegebedarf.



**INKONTINENZ-
PRODUKTE**



BABY



BETTSCHUTZ



**SCHUTZ-
KLEIDUNG**



HAUTPFLEGE



KÖRPERPFLEGE



HANDSCHUHE

Besuchen Sie Abena online unter www.abena.at

Weltweite umweltfreundliche Produktion

Die Abena-Gruppe ist ein internationales Gesundheitsunternehmen, das mit mehr als 25.000 Produkten verschiedene Branchen bedient.

Wir machen es uns zur Aufgabe, mehr zu wissen! Über unser globales Beschaffungsnetz und interne Spezialisten sorgen wir für die Bereitstellung der Produkte, die Sie benötigen.

Dazu gehören Produkt-, Beschaffungs- und Pflegeexperten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alles und noch mehr über die Produkte zu wissen, die Sie täglich benötigen.



Unsere Produkte tragen zahlreiche Umweltzeichen: FSC™ (Forest Stewardship Council™), EU-Umweltzeichen, Nordisches Umweltzeichen und viele mehr.



Die Herstellungsprozesse sind auf den optimalen Einsatz von Rohstoffen und die Suche nach umweltfreundlichen Alternativen ausgerichtet.



Verringerung von CO₂: In Dänemark konnten wir den CO₂-Ausstoß seit 2008 um 19 % senken.



Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung durch ein effizientes Beschaffungsmanagement und die Eliminierung von Abfällen.



Unsere Werke erfüllen die ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 (DK, SWE)

Eigene Produktion

Weltweit verfügt ABENA über mehr als 30 Produktionslinien, die ein breites Angebot von Inkontinenzprodukten für Sie herstellen - Tag für Tag. Wir setzen automatisierte und robotergesteuerte Herstellungsverfahren ein und unsere Produktionslinien sind direkt mit unseren Lagern verbunden.

Wir haben Nachhaltigkeit im Blut – und Sie profitieren davon! Wie, lesen Sie unter www.abena.at

86,4% der Abfälle unserer dänischen Produktionsstätte wurden in 2018 recycelt. Die Abfälle bestehen unter Anderem aus Verpackungsfolien von Rohmaterialien und Textilüberschuss. Sie werden gesammelt und an Recycling-Firmen zur Aufbereitung für die Herstellung neuer Produkte verkauft.

Wir suchen weltweit nach den besten Lösungen

Dank 40 Jahren Erfahrung verfügt unser Einkauf über ein umfangreiches Wissen zu Prozessen, Rohstoffen, Lieferketten und Logistik.


Wir finden Hersteller nicht nur, sondern suchen vor Ort nach vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partnern.

Die Qualifizierung unserer Lieferanten umfasst eine ausführliche Liste von Kontrollpunkten auf Grundlage der Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Unser Verhaltenskodex basiert auf der UN's Global Compact (UNGC) und der BSCI. Die Verpflichtung zur Einhaltung der UN Global Compact umfasst eine Reihe von Anforderungen hinsichtlich Umwelt, Ethik, sozialer Verantwortung, Sicherheit und Finanzen.

85 %
unserer Lieferanten haben die UN Global Compact unterzeichnet

- Bezug direkt vom Hersteller
- Lokale Produkt- und Beschaffungsexperten auf der ganzen Welt
- Nutzung von lokalem Know-how und der richtigen Qualität zum besten Preis

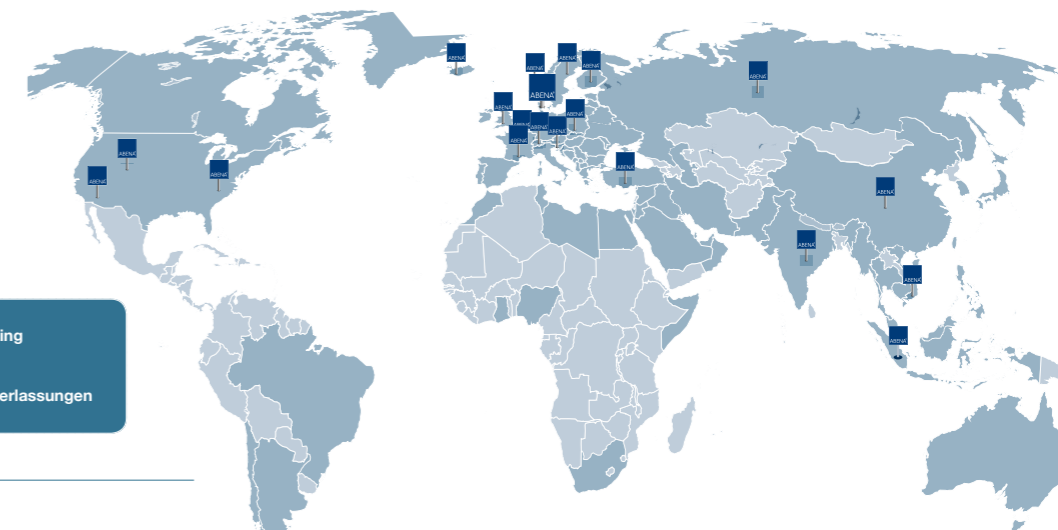

Lokale Lagerung

Abena liefert Waren aus modernen Logistikzentren, bei denen es sich um vollautomatisierte Hochregallager handelt. In Österreich lagern wir die Waren zentral im ABENA-Österreich Lager in Graz sowie regional bei unseren Partnern. Unser Fokus liegt hier auf der Optimierung der Logistik – helfen wir gemeinsam dabei die Umwelt zu schützen, Transportkosten zu sparen und im Sinne der Versorgungssicherheit lokal in Österreich zu lagern.

Symbolerläuterung

 <p>Asthma Allergy Nordic</p> <p>Asthma Allergy Nordic ist eine gemeinsame Kennzeichnung der drei Asthma- und Allergieverbände aus Schweden, Dänemark und Norwegen. Die Hauptaufgabe dieser Kennzeichnung ist, es Menschen mit Allergien, Kontaktallergien, Asthma und andersartigen Atembeschwerden einfacher zu machen Produkte zu finden, die ihren Alltag erleichtern.</p>	 <p>Nordic Swan Ecolabel</p> <p>Das Nordische Umweltzeichen und das EU-Umweltzeichen sind weltweit für ihre strengen Anforderungen bei Gesundheit, Qualität und Umwelt anerkannt. Der Schwan wird jedoch vom Nordischen Ministerrat für die Nordischen Länder herausgegeben, während die Euroblume von der Europäischen Kommission herausgegeben und in der gesamten EU verwendet wird.</p>	 <p>EU Ecolabel</p> <p>Die Euroblume, das Europäische Umweltzeichen, kennzeichnet besonders umweltfreundliche Produkte und gibt dieselben Garantien wie das Nordische Umweltzeichen, der Schwan. Beide werden von Ecolabelling in Dänemark verwaltet. Der Schwan wird jedoch vom Nordischen Ministerrat für die Nordischen Länder herausgegeben, während die Euroblume von der Europäischen Kommission herausgegeben und in der gesamten EU verwendet wird.</p>
 <p>FSC™</p> <p>FSC™ (Forest Stewardship Council) ist eine internationale nichtstaatliche Organisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC™-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen nachhaltig bewirtschafteter Wälder und umweltfreundlicher Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Etiketts wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Mit der Wahl FSC™-zertifizierter Produkte helfen Sie, die Wälder, sowie die Menschen und die Tierwelt, die den Wald ihr zu Hause nennen, zu schützen. www.FSC.org</p>	 <p>Dermatologisch getestet</p> <p>Diese Kennzeichnung für dermatologisch getestete Produkte garantiert, dass das entsprechende Produkt von einem unabhängigen Labor auf mögliche Hautreaktionen getestet wurde.</p>	 <p>CE-Kennzeichnung</p> <p>Die CE-Kennzeichnung wurde durch die Europäische Kommission herausgegeben und garantiert Verbrauchern, dass die ausgezeichneten Produkte in Übereinstimmung mit den europäischen Sicherheitsanforderungen hergestellt wurden. Bei Produkten mit CE-Kennzeichnung können sich Verbraucher darauf verlassen, dass sie die Produkte unabhängig vom Ort ihrer Produktion bedenkenlos verwenden können. Bestimmte Produkte, wie z.B. medizinische Ausrüstung und Schutzausrüstung, müssen die CE-Kennzeichnung tragen, damit sie in der Europäischen Union vertrieben werden dürfen.</p>
 <p>Zum Einmalgebrauch</p> <p>Produkte mit dieser Kennzeichnung sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt.</p>	 <p>Latexfrei</p> <p>Produkte mit diesem Symbol sind frei von Latexproteinen.</p>	 <p>Auf Anfrage</p> <p>Bei den mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikeln handelt es sich um Sonderbestellungen.</p>

Inhaltsverzeichnis

12 Inkontinenz

34 Baby

42 Bettschutz

50 Schutzkleidung

58 Hautpflege

68 Körperpflege

78 Handschuhe



INKONTINENZ

Personalisierte Kontinenzpflege durch Experten

Die Inkontinenzversorgung muss immer individuell gestaltet werden. Alle Menschen sind verschieden. Die Anatomie, die Haut und der Grad der Inkontinenz sind unterschiedlich. Unterschiede bei Alter, Persönlichkeit, Lebensstil und Umständen erfordern einen individuellen Umgang mit der Kontinenzpflege.

Unser internationales Team aus geschultem und erfahreinem Gesundheits- und Krankenpflegepersonal und Produktspezialisten ist stets bereit, Sie bei der Auswahl und Anwendung der Produkte zu unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit Praktikern entwickeln wir das Produktportfolio kontinuierlich weiter, um den Bedürfnissen von Benutzern und Pflegekräften gerecht zu werden.



Wir sind stolz, der erste Hersteller von Inkontinenzprodukten zu sein, der mit dem Nordischen Umweltzeichen zertifiziert ist.

Erfahren Sie mehr:
www.abena.at

TROPFENSYSTEM

Mit dem Tropfensystem von Abena lässt sich das passende Produkt für den individuellen Bedarf leicht auswählen.

	1 bis 3 Tropfen = leichte Inkontinenz
	4 bis 5 Tropfen = mittlere Inkontinenz
	6 bis 8 Tropfen = starke Inkontinenz
	9 Tropfen = sehr starke Inkontinenz

Hier finden Sie das vielfältigste Angebot an Inkontinenzprodukten von höchster Qualität aus weichen, atmungsaktiven Materialien mit überragendem Auslaufschutz.

- Gemacht für Komfort und Sicherheit.
- Als weltweit erster Hersteller von Inkontinenzprodukten sind wir wegweisend im Umweltschutz und mit dem nordischen Umweltzeichen zertifiziert.
- Überragender Auslaufschutz und Hauttrockenheit.
- 100% atmungsaktiv für gesunde Haut und optimalen Komfort.
- Modernste Geruchskontrolle für Diskretion.
- Sorgfältig ausgewählte Materialien.
- Dermatologisch getestet.



INKONTINENZ Sortimentsübersicht

18	Anatomisch geformte Einlagen	Abri-San Premium
20	Produkte für Männer	Abri-Man Premium
22	Fixierprodukte	Abri-Fix
24	Inkontinenzslip	Abri-Form Premium
24	Produkte für Kinder	Abri-Form Premium Junior
26	Gürtelprodukte	Abri-Wing Premium
28	Inkontinenzhosen	Abri-Flex Premium
30	Produkte in Übergrößen	Abri-San Premium, Abri-Form, Abri-Flex
32	Inkontinenz- und Wöchnerinnenvorlagen	Abri-Let



GANZHEITLICHER ANSATZ ZUR KONTINENZPFLEGE

Wir möchten die Lebensqualität für Menschen mit Inkontinenz durch einen ganzheitlichen Ansatz verbessern, indem wir Institutionen, Pflegekräften und Endverbrauchern die bestmögliche Inkontinenzpflege ermöglichen.

Ein ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt die gesamte Person, einschließlich Ernährung, Bewegung, Hautpflege, allgemeinem Lebensstil und Lebensqualität. Darüber hinaus berücksichtigt er die Rolle der Pflegenden und legt Wert auf Prävention sowie die richtige Behandlung inkontinenzbedingter Zustände.



NORDISCHES UMWELTZEICHEN

Ein Gütesiegel für Qualität und Sicherheit

Mit mehr als 1200 Abena-Produkten, die das Nordische Umweltzeichen tragen, gibt es mit Sicherheit ein umweltfreundliches Produkt für jeden Bedarf, von Inkontinenz bis zur Hautpflege und Hautreinigung.



Abena ist stolz, der **erste Hersteller** von Inkontinenzprodukten zu sein, der mit dem Nordischen Umweltzeichen zertifiziert wurde

Mehr als 80% unserer Babywindeln und **Inkontinenzprodukte** tragen das **Nordische Umweltzeichen**.

>80%

Erfahren Sie mehr unter www.abena.at



Wenn Sie sich für ein Produkt entscheiden, das mit dem Nordischen Umweltzeichen oder dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet wurde, **tragen Sie dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren** - und mit jedem Produkt, das Sie wählen, können Sie sicher sein, dass es zu den besten seiner Kategorie zählt.

Das Nordische Umweltzeichen und das EU-Umweltzeichen sind weltweit für ihre strengen Anforderungen an **Gesundheit, Qualität und Umwelt anerkannt.**



Das Nordische Umweltzeichen und das EU-Umweltzeichen bedeuten:

- **Hohe Umwelтанforderungen** - in allen relevanten Phasen des Produktlebenszyklus
- **Hohe Anforderungen an Chemikalien**
- **Kontinuierliche Verschärfung der Anforderungen**
- **Verringerung der Umweltauswirkungen durch Produktion und Verbrauch.**

DAS WELTWEIT ERSTE DIGITALE INKONTINENZPRODUKT FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ



- SPART ZEIT
- WENIGER LECKAGEN
- WENIGER PRODUKTWECHSEL
- VERBESSERTER NACHTSCHLAF

Verbesserte Qualität der Kontinenzpflege

Abena Nova mit MediSens ist der Marktführer in der intelligenten Inkontinenzversorgung für den täglichen Gebrauch.

Erfahren Sie mehr unter www.abena.at

Neue einzigartige tragbare Sensor Technologie

Abena Nova nutzt eine einzigartige drahtlose Verbindung zu digitalen Sensoren, um den Pflegenden nützliche Erkenntnisse zu liefern. Die Sensoren im Produkt registrieren fortlaufend Änderungen des Feuchtigkeitsgehalts und geben über die Abena Nova-App Echtzeitinformationen an die Pflegekräfte auf ein mobiles Gerät weiter. So können die Pflegekräfte eine auf die individuellen Bedürfnisse und bewährten Verfahren abgestimmte, personalisierte Pflege für Menschen mit Harninkontinenz anbieten.

Mehr Zeit für personalisierte Pflege

Unsere Studien zeigen, dass Abena Nova die Lebensqualität der Anwender mehr als verbessert. Dies entlastet auch die Pflegekräfte und spart Zeit für eine noch hochwertigere Pflege.

“Ich verbringe viel Zeit mit den Bewohnern. Anstatt ihr Inkontinenzprodukt zu überprüfen, kann ich diesen persönlichen Kontakt für etwas anderes verwenden, und das freut die Patienten und mich.”

Britta Andersen, Krankenschwester beim Pflegeheim Lergården, Aabenraa, Dänemark

Höhere Lebensqualität beim Leben mit Inkontinenz

Durch die Bereitstellung nützlicher Erkenntnisse und die Möglichkeit zur richtigen Zeit die Produkte zu wechseln, wird der Bedarf an manueller Überprüfungen auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis ist eine geringere Liegedauer in einem nassen Produkt, weniger nasse Betten und weniger Auslauf.

“Innovationen wie dieses intelligente Inkontinenzprodukt können die Lebensqualität verbessern, das Sicherheitsgefühl und die Selbständigkeit unserer Klienten fördern”

Greet Prins, Vorsitzende des Verwaltungsrats, Philadelphia Zorg

NOMINATED FOR



WINNER OF



WINNER OF



WINNER OF



Anatomisch geformte Einlagen



Maximaler Komfort, Schutz und Diskretion

- Die atmungsaktive Einlage bietet einen optimalen Tragekomfort für den Anwender.
- Die spezielle Materialzusammensetzung (Top-Dry-System) sorgt für eine schnelle Absorption und trockene Oberfläche.
- Anatomisch geformte Einlage mit optimaler Passform.
- Seitliche Barrieren bieten zusätzlichen Auslaufschutz.
- Das Anti-Geruchsystem neutralisiert unangenehme Gerüche.
- Abri-San Special Produkte sind auch bei Stuhlinkontinenz geeignet.
- Nässeindikator mit Skala um die Auslastung des Produktes anzuzeigen.



ANLEGETECHNIK (STEHEND)

1

Falten Sie die Einlage der Länge nach mit der Rückseite nach außen, ohne die Einlageninnenseite zu berühren. Legen Sie die Einlage von vorne zwischen den Beinen hindurch. Hinten wird der obere Teil auf Höhe des Steißbeins platziert.

2

Breiten Sie die Einlage hinten aus, sodass sich zwischen den Beinen ein Kanal bildet.

3

Einlage hinten ausbreiten, so dass sich zwischen den Beinen eine Schüsselform bildet.

4

Fixierhose hochziehen. Wenn möglich, sollte das Hosenbein auf der Rückseite der Einlage platziert werden. Korrigieren Sie den Sitz der Fixierhose auch vorn. Der Rand der Rückseite sollte der Leiste folgen.



Geformte Einlage, Abena Abri-San



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Größe	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
9253	1	220x100 mm	200 ml	28	10
9254	1A	280x100 mm	200 ml	28	12
9260	2	260x100 mm	350 ml	28	9
9266	3	330x110 mm	500 ml	28	7
9267	3A	330x110 mm	650 ml	28	7
9271	4	420x200 mm	800 ml	28	6



Abri-San 1-4 ist unser Premium-Sortiment an anatomisch geformten Einlagen für leichte bis mittelschwere Inkontinenz. Das Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor.

Die atmungsaktiven und anatomisch geformten Einlagen tragen zum Schutz der Haut und einer optimalen Passform bei. Alle Produkte sind mit einem seitlich verlaufenden Auslaufschutz für zusätzliche Sicherheit ausgestattet.

Die Produkte tragen das Nordische Umweltzeichen und werden aus FSC-zertifizierten Materialien hergestellt.



Geformte Einlage, Abena Abri-San



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Größe	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
9374	5	540x280mm	1200 ml	36	4
9378	6	630x300mm	1600 ml	34	3
9381	7	630x360mm	2100 ml	30	4
9382	8	630x360mm	2500 ml	21	4
9384	9	730x370mm	2400 ml	25	4
9386	10	730x370mm	2800 ml	21	4
9389	11	730x370mm	3400 ml	16	4



Abri-San 5-11 ist unser Premium-Sortiment an anatomisch geformten Einlagen für mittelschwere bis schwere Inkontinenz. Das Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor.

Die atmungsaktiven und anatomisch geformten Einlagen tragen zum Schutz der Haut und einer optimalen Passform bei. Alle Produkte haben einen hohen seitlichen Auslaufschutz kombiniert mit vorderen und hinteren inneren Auslaufbarrieren für extra Schutz. Der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum. Der Nässeindikator mit der Skala erleichtert Benutzern und Pflegepersonen die Auswahl des Produkts mit dem richtigen Absorptionsgrad als auch den Zeitpunkt des Produktwechsels. Wir empfehlen die Verwendung der Artikel Abri-San 5-11 in Verbindung mit speziellen Fixierhosen wie Abri-Fix.

Die dermatologisch getesteten Produkte tragen das Nordische Umweltzeichen.



Geformte Einlage, Abena Abri-San



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Größe	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
300200	Special	730x370mm	2000 ml	28	4



Abri-San Special ist unsere anatomisch geformte Einlage speziell bei Stuhlinkontinenz.

Die Einlage kann sowohl bei Stuhl- als auch Harninkontinenz verwendet werden und verfügt über eine textilartige Außenfolie für optimalen Komfort und Diskretion. Die Einlage verfügt über einen wirksamen Auslaufschutz mit eingebauten Taschen, die den Stuhlinhalt auffangen. Wir empfehlen die Verwendung des Artikels Abri-San Special in Verbindung mit speziellen Fixierhosen wie Abri-Fix.



Produkte für Männer




Speziell für die männliche Harninkontinenz entwickelt


- Speziell für die männliche Anatomie entwickelt.
- Ultraweiches Material für hohen Tragekomfort bei der täglichen Anwendung.
- Sicherer und einfacher Sitz in normaler Unterwäsche.
- Das einzigartige Top-Dry-System sorgt für eine trockene Oberflächen- und Hautschutz.
- Doppelte Top-Dry Materialschichten bieten zusätzliche Saugkraft im vorderen Bereich des Produktes. (Abri-Man-Premium Special)
- Kein Auslaufen dank integrierter Taschen und einzigartigem Barriersystem.



ANLEGETECHNIK (STEHEND)

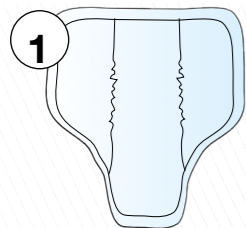


1 Falten Sie die Einlage auf. Berühren Sie nicht die Innenseite der Einlage.

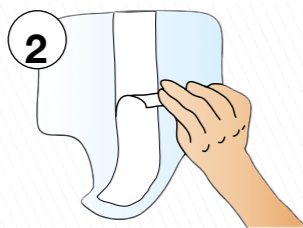

2 Entfernen Sie den Schutzstreifen vom Klebestreifen.



3 Platzieren Sie die Einlage mit der breiten Seite nach oben, vorn in eng anliegender Unterwäsche oder Fixierhose.

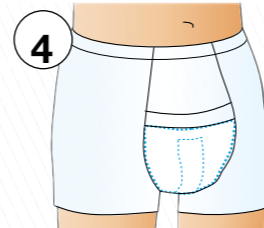

4 Ziehen Sie die Unterhose/ Fixierhose an.



Produkt für den Mann, Abena Abri-Man



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Größe	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
300740	Zero	180x93mm	200 ml	24	16



Abri-Man Zero ist unser Produkt speziell für männliche Benutzer, das diskrete Sicherheit bei leichter Inkontinenz bietet. Die geschwungene Form ist auf die männliche Anatomie abgestimmt und bietet eine hervorragende Passform für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das atmungsaktive Produkt mit Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor. Der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum.



Produkt für den Mann, Abena Abri-Man



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Größe	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
41006	Formula 1	290x230mm	450 ml	14	12
41007	Formula 2	290x230mm	700 ml	14	12



Abri-Man Premium ist unser Produktsortiment speziell für Männer, das diskrete Sicherheit bei leichter Inkontinenz bietet. Die T-förmige Einlage ist auf die männliche Anatomie abgestimmt und bietet eine hervorragende Passform für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die Mikrolöcher in der obersten Schicht und das Top-Dry-System sorgen für ein schnelles Verteilen der Flüssigkeit und eine trockene Oberfläche. Abri-Man verfügt über einen einzigartigen Auslaufschutz mit eingebauten Taschen für zusätzliche Sicherheit. Der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum.

Die dermatologisch getesteten Produkte tragen das Nordische Umweltzeichen.



Produkt für den Mann, Abena Abri-Man



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Größe	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
207203	Slipguard	400x85mm	900 ml	20	5



Abri-Man Slipguard ist unsere rechteckige Premium-Einlage speziell für Männer, die diskrete Sicherheit bei leichter bis mittelschwerer Inkontinenz bietet. Das Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor.

Die atmungsaktive Einlage schützt die Haut und bietet eine hervorragende Passform. Alle Produkte sind mit einem Auslaufschutz für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und der Geruchsbinder minimiert unangenehme Gerüche.



Produkt für den Mann, Abena Abri-Man



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Größe	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
300744	Special	730x370mm	2800 ml	21	4



Abri-Man Special wurde speziell für die männliche Anatomie entwickelt. Abri-Man Special ist ideal für mittelschwere bis schwere Inkontinenz geeignet und bietet auch eine sichere Lösung für den Einsatz bei Nacht. Es wird aus einem hochwertigen Vliesmaterial hergestellt, das zusätzliche Weichheit bietet. Die Produkte verfügen über eine Top-Dry-Doppelschicht an der Vorderseite, um eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme dort zu ermöglichen, wo sie am meisten benötigt wird. Die atmungsaktiven und anatomisch geformten Einlagen tragen zu einem optimalen Hautschutz und verbesserter Passform bei. Alle Produkte sind mit einem speziellen Auslaufschutz für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und der Geruchsbinder minimiert unangenehme Gerüche. Die dermatologisch getesteten Produkte tragen das Nordische Umweltzeichen.



Fixierprodukte




Für mehr Komfort und Schutz

- Für optimale Einlagenfixierung und Tragekomfort für jeden Tag.
- Komfort und Design wie bei normaler Unterwäsche.
- Breites Produktsortiment für individuelle Erfordernisse und Präferenzen. Umfassende Verfügbarkeit von Größen X-Small bis 6X-Large.
- Bietet zusätzlichen Schutz und Tragekomfort.



ABRI-FIX VS. HERKÖMMLICHE UNTERWÄSCHE

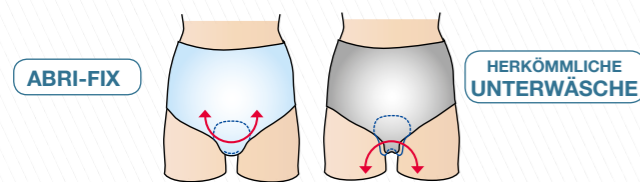

FARBKODIERUNG

Ein einfach lesbares Farbkodierungssystem um leicht die richtige Größe zu finden

- | | |
|----|-----|
| XS | 2XL |
| S | 3XL |
| M | 4XL |
| L | 5XL |
| XL | 6XL |

Abri-San Premium 5-11, Abri-San Premium Special und Abri-Man Premium Special sollten gemeinsam mit einer speziellen Fixierunterwäsche wie Abri-Fix verwendet werden.



Fixierhosen, Abena Abri-Fix Pants



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Eigen-schaften	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
4238	S	50-80 cm	Mit Bein	10 / 60
4239	M	70-100 cm	Mit Bein	10 / 60
4240	L	85-120 cm	Mit Bein	10 / 60
4241	XL	105-130 cm	Mit Bein	10 / 60
4242	XXL	115-140 cm	Mit Bein	10 / 60
4243	3XL	120-150 cm	Mit Bein	10 / 60



Abri-Fix Pants ist eine klassische Fixierhose aus weichem, bequemem Material, die speziell für Pflege- oder Betreuungseinrichtungen konzipiert wurde. Das dünne und hochelastische Material gewährleistet die sichere Fixierung kleinerer Einlagen bei Personen mit voller Mobilität. Es bietet auch eine gute Unterstützung für größere Einlagen bei Personen mit eingeschränkter Mobilität. Das Produkt hat eine enge Passform mit längerem Bein und ohne Nähte im Schritt (Schlauchstricktechnik) für einen angenehmen Tragekomfort. 96 % Polyamid, 4 % Elastan.



Fixierhosen, Abena Abri-Fix Pants Super



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Eigen-schaften	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
90691	S	75-105 cm	Mit Bein	3 / 20
90692	M	80-120 cm	Mit Bein	3 / 20
90693	L	90-130 cm	Mit Bein	3 / 20
90694	XL	95-145 cm	Mit Bein	3 / 20
90695	XXL	105-155 cm	Mit Bein	3 / 20
90696	3XL	110-165 cm	Mit Bein	3 / 20
90697	4XL	130-175 cm	Mit Bein	3 / 20
90698	5XL	150-185 cm	Mit Bein	3 / 20
90699	6XL	170-250 cm	Mit Bein	3 / 20



Die Abri-Fix Pants Super ist eine elastische Fixierhose mit Bein aus atmungsaktivem, weichem Mikrofasermaterial, das der anatomischen Form des Körpers folgt. Die Fixierhosen ähneln bei Design und Komfort normaler Unterwäsche. Die Ausführung mit gestricktem elastischen Material hält die Einlage fest am Körper und gewährleistet so die Auslaufesicherheit. Sie bietet optimale Leistung für alle Aktivitäts- und Mobilitätsstufen. Die nahtlose Stricktechnik – ein innovatives Konzept zur nahezu nahtlosen Herstellung von Bekleidung – beugt Druckstellen und einer Reizung der Haut vor. Die Produkte können 100 Mal gewaschen werden und sind daher bei längerem Gebrauch sehr wirtschaftlich. Abri-Fix Pants Super haben einen farbcodierten Taillenbund, der die Größe anzeigt und zudem Produktname, Waschanleitung und Materialzusammensetzung enthält. 97 % Polyester, 3 % Elastan.



Bodystocking, Abena Abri-Fix Bodystocking



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Eigen-schaften	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
1000012709	S	80-105 cm	Mit Reißverschluss, Arm und Bein	1 / 12
1000012710	M	85-110 cm	Mit Reißverschluss, Arm und Bein	1 / 12
1000012711	L	90-115 cm	Mit Reißverschluss, Arm und Bein	1 / 12
1000012712	XL	95-120 cm	Mit Reißverschluss, Arm und Bein	1 / 12
1000012713	XXL	100-125 cm	Mit Reißverschluss, Arm und Bein	1 / 12



Textile Fixierhose zum Fixieren einer Einlage, integriert in eine Ganzkörperunterwäsche. Abri-Fix Bodystocking ist ein weicher und flexibler Baumwollanzug mit Arm und Bein. Dieses Material führt die Feuchtigkeit von der Haut weg und sorgt für ein trockenes, angenehmes Gefühl. Die Reißverschlüsse im Schritt und Schulterbereich ermöglichen ein einfaches Anziehen und Anpassen. Die Reißverschlüsse sind abgedeckt und schützen vor einer Reizung der Haut. Größe und Waschanleitung sind auf dem Kleidungsetikett angegeben. 75% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Elastan.



Inkontinenzslip



Maximaler Schutz für anspruchsvolle Situationen

- Atmungsaktive Inkontinenzslips für einen optimalen Sitz am Körper.
- Die spezielle Materialzusammensetzung bindet die Flüssigkeit schnell und sorgt für eine trockene Oberfläche.
- Hochwertige Klebebänder sorgen für einen optimalen Sitz und lassen sich einfach lösen und wieder befestigen, um das Produkt optimal anzupassen.
- Barrieren schützen zuverlässig vor einem Auslaufen.
- Das Anti-Geruchsystem schützt vor unangenehmen Gerüchen und sorgt für diskreten Schutz.
- Nässeindikator mit Skala.



ANLEGETECHNIK (LIEGEND)



1 Falten Sie den Inkontinenzslip der Länge nach mit der Rückseite nach außen. Berühren Sie nicht die Innenseite des Produktes.

2 Legen Sie den Anwender des Produktes auf die Seite und ziehen Sie den Inkontinenzslip von vorne nach hinten durch die Beine.

3 Legen Sie den Anwender auf den Rücken und ziehen Sie den Inkontinenzslip horizontal aus, so dass eine Schüsselform entsteht.

4 Befestigen Sie die unteren Klebebänder, sodass sich der Slip dem Körper anpasst. Bilden Sie am Bund eine Falte und befestigen Sie die oberen Klebebänder nach unten über der Falte. Danach den Sitz der Kante in der Leiste korrigieren.



Inkontinenzslip, Abena Abri-Form



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
43054	XS2	50-60 cm	1400 ml	32	4
43055	S2	60-85 cm	1800 ml	28	3
43056	S4	60-85 cm	2200 ml	22	3
43049	M0	70-110 cm	1500 ml	26	4
43061	M1	70-110 cm	2000 ml	26	4
43060	M2	70-110 cm	2600 ml	24	4
43062	M3	70-110 cm	3100 ml	22	4
43063	M4	70-110 cm	3600 ml	14	4
43059	L0	100-150 cm	2000 ml	26	4
43066	L1	100-150 cm	2500 ml	26	4
43065	L2	100-150 cm	3100 ml	22	4
43067	L3	100-150 cm	3400 ml	20	4
43068	L4	100-150 cm	4000 ml	12	4
43069	XL2	110-170 cm	3400 ml	20	4
43071	XL4	110-170 cm	4000 ml	12	4

Abri-Form ist unser Premium-Sortiment an Inkontinenzslips für mittelschwere bis schwere Inkontinenz. Das Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor.

Die atmungsaktiven und anatomisch geformten Produkte mit elastischem Beinausschnitt schützen die Haut und ermöglichen eine optimale Passform. Alle Produkte haben einen seitlichen Auslaufschutz, sowie eine integrierte hintere Auslaufbarriere für extra Schutz. Der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum. Die hochwertigen und dehnbaren, seitlichen Klettverschlüsse (je 2 pro Seite) garantieren ein unkompliziertes Anlegen und optimalen, individuellen Tragekomfort.

Der Nässeindikator mit Skala erleichtert Benutzern und Pflegepersonen die Auswahl des Produkts mit dem richtigen Absorptionsgrad und hilft den Produktwechsellhythmus zu optimieren.

Die dermatologisch getesteten Produkte tragen das Nordische Umweltzeichen.



Produkt für Kinder



Inkontinenzslip, Abena Abri-Form Junior



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
43050	Junior XS2	40-60 cm	1500 ml	32	4

Abri-Form Junior XS2 ist unser Premium Inkontinenzslip speziell für Kinder und Jugendliche, die optimal vor unfreiwilligem Urinverlust schützt und die Lücke zwischen Babywindeln und Inkontinenzprodukten für Erwachsene schließt. Das Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor.

Das Junior-Produkt bietet einen schmalen Kern und einen kleineren Beinschnitt, der eine perfekte Passform ergibt. Es sieht eher aus wie gewöhnliche Unterwäsche mit einer bedruckten textiltähnlichen Außenseite.

Der atmungsaktive und anatomisch geformte Inkontinenzslip schützt die Haut. Das Produkt ist mit einem Auslaufschutz für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und der Geruchsbinder minimiert unangenehme Gerüche. Die hochwertigen und dehnbaren Verschlüsse garantieren ein unkompliziertes Anlegen und optimalen, individuellen Tragekomfort.

Die dermatologisch getesteten Produkte tragen das Nordische Umweltzeichen.



Gürtelprodukte



Einzigartige Anpassungseigenschaften für mehr Freiheit

- NEUES erweitertes Sortiment mit erhöhter Saugfähigkeit.
- NEUES und optimiertes Befestigungssystem mit weichen Vliesbändern und einfach einstellbaren Klettverschlüssen.
- Das ganze Produkt ist 100% atmungsaktiv für optimalen Hautschutz und Tragekomfort.
- Voll atmungsaktive, textilähnliche Rückseite - für den geräuschlosen, diskreten Sitz, hervorragenden Tragekomfort und gesündere Haut.
- Das einzigartige Top-Dry-System sorgt für eine trockene Oberfläche und Hautschutz.
- Hervorragende Testergebnisse bei Auslaufschutz und Trockenheit.
- Einfach selbstanzulegende Inkontinenzversorgung.



Dermatologisch getestet.
Das Produkt ist klinisch getestet auf
Hautirritationen und Allergien.



Gürtelprodukt, Abena Abri-Wing



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
1000009115	■■■ S1	50-85 cm	1450 ml	15	4
1000009116	■■■ S2	50-85 cm	1800 ml	15	4
1000009117	■■■ S3	50-85 cm	2500 ml	15	4
1000009118	■■■ M1	70-110 cm	1800 ml	15	4
1000009119	■■■ M2	70-110 cm	2300 ml	15	4
1000009120	■■■ M3	70-110 cm	3000 ml	15	4
1000009121	■■■ M4	70-110 cm	3550 ml	15	4
1000009122	■■■ L1	90-135 cm	2050 ml	15	4
1000009123	■■■ L2	90-135 cm	2500 ml	15	4
1000009124	■■■ L3	90-135 cm	3500 ml	15	4
1000009125	■■■ L4	90-135 cm	4100 ml	15	4
1000009126	■■■ XL1	110-160 cm	2550 ml	15	4
1000009127	■■■ XL2	110-160 cm	3000 ml	15	4
1000009128	■■■ XL3	110-160 cm	4100 ml	15	4




Abri-Wing ist unser Premium-Sortiment an Gürtelprodukten für mittelschwere bis schwere Inkontinenz. Die Produkte sind dermatologisch getestet und verfügen über das Top-Dry-System für einen optimalen Tragekomfort und Schutz der Haut.

Alle Produkte sind vollständig atmungsaktiv und mit einem Auslaufschutz für zusätzliche Sicherheit ausgestattet. Der weiche Vliesgürtel ist eine gute Fixierlösung für alle Körperformen. Die leicht verstellbaren Verschlüsse können mehrmals neu positioniert werden. Der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum.


Die einzigartigen Anpassungseigenschaften machen Abri-Wing zu einer hervorragenden Lösung für Benutzer, die sich selbst versorgen können.




ANLEGETECHNIK (STEHEND)

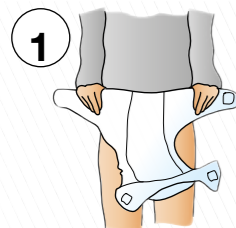


1 Falten Sie das Inkontinenzprodukt auf. Berühren Sie nicht die Innenseite des Produkts.

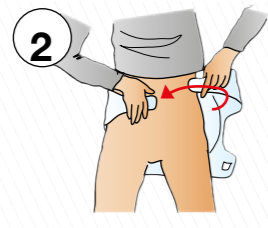

2 Schließen Sie den Gürtel um die Hüften und fixieren Sie ihn mit den Klebebändern.

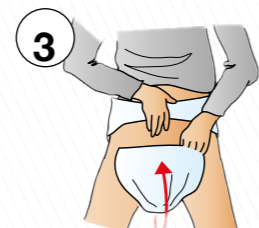

3 Ziehen Sie das Inkontinenzprodukt von hinten nach vorne.

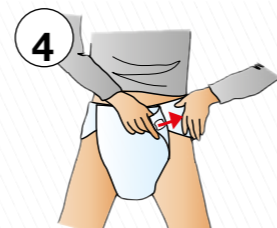

4 Befestigen Sie die Vorderseite mit den Klettverschlüssen auf jeder Seite am Gürtel.

Inkontinenzhosen




Entwickelt für ein aktives Leben


- Sicherer Halt dank Lycra-Fäden.
- Weiche Materialien, die sich wie normale Unterwäsche anfühlen.
- 3D Dual Core für eine schnelle Absorbierung.
- Erhältlich in 5 Größen und 4 Saugstärken.
- Das Top-Dry-System sorgt für eine trockene Oberfläche und schützt die Haut vor Irritationen und Rötungen.
- Das ganze Produkt ist 100% atmungsaktiv für optimalen Hautschutz und Tragekomfort.



ANLEGETECHNIK (STEHEND)

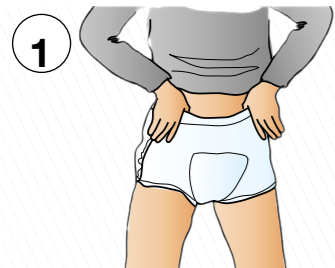

Ziehen Sie die Inkontinenzhose wie normale Unterwäsche an. Berühren Sie nicht die Innenseite des Produkts.

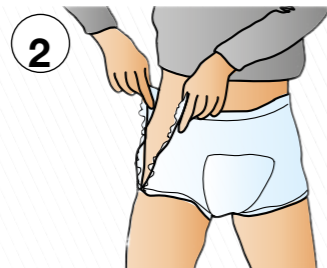

Reißen Sie die Seiten der Inkontinenzhose nach Gebrauch und beim Wechseln auf.



Wenn die Inkontinenzhose an beiden Seiten frei ist, diese zusammenrollen und entsorgen. Zur hygienischen Entsorgung nutzen Sie den, auf der Rückseite (Mitte) befindlichen, durchsichtigen Klebestreifen.



Inkontinenzhose, Abena Abri-Flex



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
1000003163	XS1*	45-70 cm	1400 ml	24	4
41071	S1	60-90 cm	1400 ml	14	6
41082	S2	60-90 cm	1900 ml	14	6
1000016664	M0	80-110 cm	900 ml	14	6
41083	M1	80-110 cm	1400 ml	14	6
41084	M2	80-110 cm	1900 ml	14	6
41085	M3	80-110 cm	2400 ml	14	6
1000016665	L0	100-140 cm	900 ml	14	6
41086	L1	100-140 cm	1400 ml	14	6
41087	L2	100-140 cm	1900 ml	14	6
41088	L3	100-140 cm	2400 ml	14	6
41089	XL1	130-170 cm	1400 ml	14	6
41090	XL2	130-170 cm	1900 ml	14	6
1000016825	XL3	130-170 cm	2600 ml	14	6

*nicht dermatologisch getestet und FSC™ zertifiziert

Abri-Flex ist unser Premium-Sortiment moderner Inkontinenzhosen, die wie normale Unterwäsche getragen werden, für mittelschwere bis schwere Inkontinenz. Das Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor.

Die diskreten Inkontinenzhosen bestehen aus atmungsaktivem, superweichem Material, um die Haut zu schützen. Der Taillenbund bietet einen sicheren und bequemen Sitz für den aktiven Benutzer. Alle Produkte sind mit einem Auslaufschutz für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und der Geruchsbinder minimiert unangenehme Gerüche. Der Nässeindikator mit Skala (nicht bei Größe XS1) erleichtert Benutzern und Pflegepersonen die Auswahl des Produkts mit dem richtigen Absorptionsgrad.



Produkte in Übergrößen



Maximale Sicherheit und Komfort

- Das einzigartige Top-Dry-System sorgt für eine trockene Oberfläche und Hautschutz.
- Textilähnliche Rückseite für gesunde Haut.
- Verschiedene Saugstärken für Tag und Nacht.
- Entwickelt für bariatrische Anatomie.
- Verfügbar in Abri-San, Abri-Form und Abri-Flex.





 **Bariatrische Lösungen**
für Nutzer mit einem
BMI 35 - 40+



Geformte Einlage, Abena Abri-San



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
300514	 7/XXL	840x460mm	2000 ml	26	4
300515	 11/XXL	840x460mm	3400 ml	14	4



Abri-San 7/XXL und 11/XXL ist Abenas Sortiment an anatomisch geformten Einlagen für die Anwendung bei Personen mit Übergrößen. Das Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor.


Die atmungsaktiven und anatomisch geformten Einlagen tragen zum Schutz der Haut und einer optimalen Passform bei. Alle Produkte haben einen hohen seitlichen Auslaufschutz kombiniert mit vorderen und hinteren inneren Auslaufbarrieren für extra Schutz. Der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum. Der Nässeindikator mit Skalierung erleichtert Benutzern und Pflegepersonen die Auswahl des Produkts mit dem richtigen Absorptionsgrad.

Die dermatologisch getesteten Produkte tragen das Nordische Umweltzeichen.



Inkontinenzslip, Abena Abri-Form



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
300516	 XXL1	170-254 cm	2250 ml	10	4




Abri-Form Übergröße ist unser Inkontinenzslip bei mittelschwerer bis schwerer Inkontinenz für Menschen mit einem Hüftumfang von bis zu 254 cm. Die Produkte verfügen über das Top-Dry-System für optimalen Komfort und Schutz der Haut.

Die Produkte bieten eine 360-Grad-Atmungsaktivität im Taillenbereich, sodass die Haut atmen kann. Der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum. Die flexiblen Seitenteile sorgen für einfachen und optimalen Sitz.



Inkontinenzhose, Abena Abri-Flex



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Hüftumfang	Saugstärke Rothwell	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
300517	 XXL1	173-203 cm	1450 ml	12	4



Abri-Flex Übergröße ist unsere moderne Inkontinenzhose für Menschen mit einem Hüftumfang von bis zu 203 cm, die wie normale Unterwäsche getragen wird, bei mittelschwerer Inkontinenz. Das Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor.

Die diskrete Inkontinenzhose hat einen Taillenbund aus mehreren elastischen Fäden, der dem aktiven Benutzer einen sicheren und bequemen Sitz bietet. Das Produkt verfügt über einen Geruchsbinder, der unangenehme Gerüche minimiert.



Inkontinenz- und Wöchnerinnenvorlagen



Mehrzweck-Vorlage

- Mehrzweckvorlage für Wöchnerinnen, Wundversorgung und leichte Inkontinenz.
- Sicher, geräuschlos und diskret.
- Das ganze Produkt ist 100% atmungsaktiv für optimalen Hautschutz und Tragekomfort.
- Möglichkeit zur Sterilisierung für die Verwendung nach Operationen.
- Neutralisierung unangenehmer Gerüche.
- Fixierung mit einem Abri-Fix-Fixierprodukt empfohlen.



Vorlage, Abena Abri-Let



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Größe	Saugstärke Rothwell	Eigen-schaften	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
300215	Anatomic	440x200mm	500 ml	Mit SAP	20 / 12



Abri-Let Anatomic ist die anatomisch geformte Mehrzweckvorlage von Abena. Das Top-Dry-System sorgt für einen optimalen Tragekomfort und beugt Hautreizungen vor.

Die atmungsaktive und anatomisch geformte Vorlage schützt die Haut und ermöglichen eine optimale Passform. Der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum.

Das Produkt trägt das Nordische Umweltzeichen.



Vorlage, Abena Abri-Let



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Größe	Saugstärke Rothwell	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
300216	Normal	390x140mm	500 ml	28 / 9



Abri-Let Normal ist eine rechteckige Vorlage von Abena für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie werden hauptsächlich verwendet bei Stuhlschmierungen und bei leichter Inkontinenz, können aber auch für Wöchnerinnen oder als Saugeinlage im Rahmen der Wundversorgung verwendet werden.

Die vollständig atmungsaktiven Vorlagen sorgen für den Schutz der Haut und optimalen Komfort für den Benutzer.





BABY

Liebevolle und umweltfreundliche Babypflege

Wir wissen, dass die Pflege Ihres Babys genauso wichtig ist wie seine Ernährung.

Deshalb sind wir bestrebt, bequeme, saugfähige und umweltfreundliche Babypflegeprodukte herzustellen, die sicher, sanft und effektiv sind. Hochwertiges Material steht für die neue Generation umweltfreundlicher Windeln.

Denn wenn Sie Produkte haben, die sowohl schützen als auch optimal funktionieren, können Sie sorgenfrei die glücklichen Momente mit Ihrem Kind genießen.

0%

Parabene
Parfüm
Lotionen
Konservierungsstoffe



Because You Care – gut für Ihr Kind und für die Umwelt

- Besonders umweltfreundlich.
- Unsere Produkte sind dermatologisch geprüft, ausgezeichnet mit dem "Nordic Swan Ecolabel" und dem FSC™-Label.
- Sorgfältig ausgewählte Materialien.
- Frei von Parabenen, Duftstoffen, Lotionen und Konservierungsmitteln.
- Weich und bequem – Für optimale Hygiene und Komfort.
- Hervorragender Auslaufschutz und Trockenheit.
- Das ganze Produkt ist 100% atmungsaktiv für optimalen Hautschutz und Tragekomfort.
- Nässeindikator mit Skala um die Auslastung des Produktes anzuzeigen.



BABY Sortimentsübersicht

36 **Babywindeln** Bambo Nature, Bambo Dreamy

38 **Feuchtpflegetücher** Bambo Nature

Babywindeln




Umweltfreundliche Babywindeln


- Hautfreundlich: Konzipiert, um das Risiko von Allergien und Windelausschlag zu minimieren.
- Durch weiche und textilähnliche Materialien liegt die Windel sanft an der Haut des Babys an.
- Das ganze Produkt ist 100% atmungsaktiv für optimalen Hautschutz und Tragekomfort.
- Perfekter Sitz für maximale Bewegungsfreiheit und minimales Auslaufrisiko.
- Elastische Bündchen sorgen für einen perfekten Sitz am Körper des Babys.
- Super saugfähig zum Einsatz am Tag und in der Nacht.
- Das Top-Dry-System sorgt für eine trockene Oberfläche und schützt die Haut vor Irritationen.
- Mit Nässeindikator.



ANWENDUNG

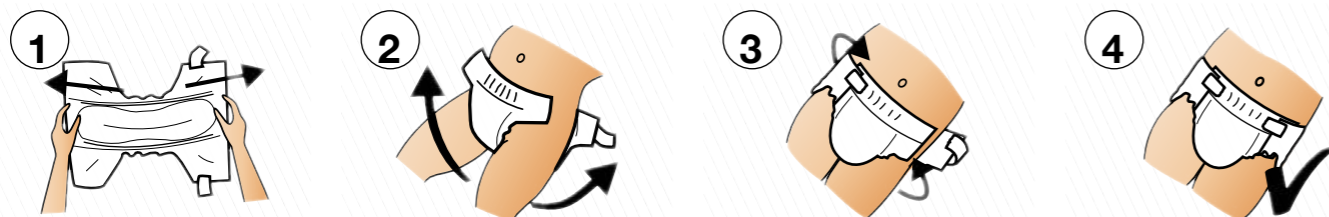

Kinderwindel, Windel, Bambo Nature

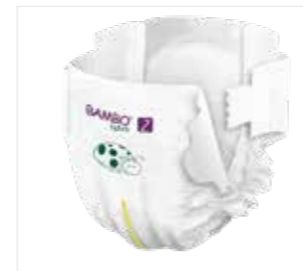

Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Körpergewicht	Eigen-schaften	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
1000019251	New born 1	2-4 kg		22 / 6
1000019252	Mini 2	3-6 kg		30 / 6
1000019253	Midi 3	4-8 kg		28 / 6
1000019263	Midi 3	4-8 kg	Großpackung	52 / 3
1000019254	Maxi 4	7-14 kg		24 / 6
1000019264	Maxi 4	7-14 kg	Großpackung	24 / 3
1000019255	Junior 5	12-18 kg		22 / 6
1000019265	Junior 5	12-18 kg	Großpackung	22 / 3
1000019256	XL 6	16+ kg		20 / 6
1000019266	XL 6	16+ kg	Großpackung	40 / 3

Dieses Produkt wird aus ausgewählten, hochwertigen Materialien hergestellt und repräsentiert die neue Generation umwelt- und hautfreundlicher Babywindeln. Die Babywindel besteht aus extra weichen Materialien, für einen bestmöglichen Tragekomfort für das Kind. Die Babywindel ist mit dem FSC- und dem Nordic Swan-Zeichen zertifiziert. Darüber hinaus ist sie dermatologisch getestet.

Bambo Nature – Das Beste für Ihr Baby und das Beste für die Natur. Ein Nässeindikator mit Skala zeigt Ihnen die Auslastung des Produktes an.



Kinderwindel, Windelhöschen, Bambo Nature Pants



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Körpergewicht	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
1000019257	Maxi 4	7-14 kg	20 / 5
1000019258	Junior 5	12-20 kg	20 / 5
1000019259	XL 6	18-30 kg	18 / 5

Die Bambo Nature Pants bieten die besten Produkteigenschaften auf dem Markt. Extra weiche Textilien, genaue Passform, dünner, leichter und atmungsaktiver mit einer hervorragenden Saugfähigkeit. Bambo Nature ist genau richtig für Sie, wenn Sie weder in Bezug auf die Umwelt noch auf die Qualität oder die Gesundheit Ihres Kindes Kompromisse eingehen möchten. Die Babywindeln gehören zu den besten der Welt und bieten optimalen Komfort, Bewegungsfreiheit und ein trockenes Gefühl. Alle Pants sind mit dem Nordic Swan- und dem FSC-Zeichen zertifiziert sowie dermatologisch getestet. Dadurch wird sichergestellt, dass besonderes Augenmerk auf die Umwelt und die empfindliche Haut Ihres Kindes gelegt wird. Die Babywindeln bestehen aus nachhaltigen Rohstoffen und es werden keine schädlichen Chemikalien im Produktionsprozess eingesetzt.



Kinderwindel, Windelhöschen, Bambo Dreamy Night Pants



Art. Nr.	Tropfen/Farbcode/Produkt	Körpergewicht	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
1000018874	Girl 4-7 Jahre	15-35 kg	10 / 6
1000018875	Boy 8-15 Jahre	15-35 kg	10 / 6
1000018876	Girl 4-7 Jahre	35-50 kg	10 / 6
1000018877	Boy 8-15 Jahre	35-50 kg	10 / 6

Die Bambo Dreamy Night Pants ist eine neue, umweltfreundliche Pants für Kinder, die mit Bettnässen zu kämpfen haben. Die Pants bieten eine hervorragende Passform, Sicherheit und Komfort, um Ihr Kind und das Bett die ganze Nacht über trocken zu halten. Sie sehen wie gemusterte, farbige Unterwäsche aus und sind daher sehr diskret. Perfekt sowohl für zuhause oder für Übernachtungen. Dreamy Night Pants bieten somit Ihrem Kind und Ihnen ein unbeschwertes Durchschlafen. Die Pants sind frei von Parfüm und Parabenen, um das Risiko von Allergien und Windeldermatitis zu minimieren.



Feuchtpflegetücher



Sauberers Gefühl für Ihr Baby

- Nordisches Umweltzeichen, Asthma-Allergie Dänemark, FSC™ und dermatologisch geprüft.
- Sanfte und weiche Materialien.
- Die Glycerin-basierte Formel bildet eine Feuchtigkeitssperre und schützt vor Irritationen.
- Frei von Parfüm, Parabenen, Phenoxyethanol, Farbstoffen und optischen Aufhellern.



Feuchtpflegetücher, Bambo Nature



Art. Nr.	Größe	Material	Eigen-schaften	Farbe	pH-Wert	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
1000012810	15x20cm	Polyester, Viskose	Mit Klebe-bandöffnung	Weiss	4-5	80 / 12



Bambo Nature Feuchtpflegetücher bestehen aus einer Mischung aus Polyester und Viskose und sind eine gute Alternative zum herkömmlichen Waschen mit Wasser und Seife. Das Produkt dient zur Körperpflege und kann am gesamten Körper des Kindes angewendet werden. Die Tücher entfernen Schweiß und schlechte Gerüche und sind als Einmalprodukte hygienisch im Gebrauch.

Die Tücher müssen nach dem Gebrauch über den Restmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



DIE BAMBO NATURE-FAMILIE BEKOMMT ZUWACHS

0%

Parabene
Parfüm
Lotionen
Konservierungsstoffe

Das Bambo Nature - Sortiment wächst mit allem, was Sie für Ihre wachsende Familie benötigen, einschließlich

- biologisch abbaubarer Feuchtpflegetücher
- Hautpflegeprodukte
- Wickelunterlagen und Bettschutz
- Windeln für Babys jeden Alters

Because you care



Mehr Informationen unter:
www.abena.at

BAMBO[®]
Nature



BETTSCHUTZ

Den Alltag erleichtern

Als wesentlicher Bestandteil eines ganzheitlichen Ansatzes im Gesundheitswesen verbessern Schutzunterlagen die Lebensqualität und erleichtern den Alltag für Patienten, Pflegebedürftige und medizinisches Personal auf der ganzen Welt.

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung und in enger Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal entwickeln wir unsere Schutzunterlagen stetig weiter. Dabei optimieren wir neben den besten Materialien auch Aufbau, Design und Verpackung unserer Produkte.

Unser Bettschutz bietet Sicherheit und Komfort für den Benutzer und entlastet das Pflegepersonal. Für den zusätzlichen Schutz Betroffener, für medizinische Behandlungen, zum Waschen bettlägeriger Patienten und für andere Pflegesituationen.

Zusätzlicher Schutz, Komfort und Sicherheit

In enger Zusammenarbeit mit Anwendern, medizinischen- und Pflegefachkräften entwickelt, bieten unsere Einwegunterlagen eine Vielzahl von wichtigen Vorteilen wie Hygiene, Trockenheit und Flexibilität.

- Sicher - durch die hochwertige Verarbeitung von leistungsfähigen und hautfreundlichen Materialien erreichen wir Spitzenwerte bei der Saugstärke und Auslaufsicherheit.
- Umweltfreundlich - konzipiert für minimale Umweltbelastung.
- Weich, komfortabel und anwenderfreundlich.
- Hygienisch - Verhindert Kreuzkontamination und die Ausbreitung von Bakterien.
- Zusätzlicher Schutz - für Komfort und Sicherheit des Anwenders.
- Große Flexibilität - durch eine breite Palette von Produkten für alle Anforderungen und den aufwandslosen, sofortigen Einsatz.
- Sichere Entsorgung - Einfache und hygienische Entsorgung nach dem Gebrauch.

BETTSCHUTZ Sortimentsübersicht

- 44 Einwegunterlagen mit Zellstofflocken Abri-Soft
- 46 Waschbare Bett- und Sitzauflagen Abri-Soft, Abena Pad
- 48 Einwegunterlagen mit Zellstofflagen Abri-Cell

Einwegunterlagen mit Zellstoffflocken

Angenehme, hygienische und komfortable Pflege

- Einwegunterlagen für unsterile medizinische Anwendungen.
- Bietet für Inkontinenz Betroffene eine zusätzliche Sicherheit.
- Flüssigkeitsundurchlässige Rückseiten und versiegelte Kanten verhindern ein Auslaufen effektiv.
- Weiche und komfortable Oberfläche mit Vlies für erhöhten Liegekomfort.
- Verschiedene Spezialprodukte mit Flügeln, Klebefestigung, atmungsaktivem Rücken und einer Tragfähigkeit von 150 kg.
- Einfache und hygienische Entsorgung nach dem Gebrauch.

✓ **Auslaufschutz an den Seiten**

✓ **Weich**
Zellstoffflockenkern

✓ **Flüssigkeitsundurchlässige Rückseite**



Unterlage, Abena Abri-Soft Basic



Art. Nr.	Material	Breite	Länge	Saugstärke Rothwell	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
4116	Zellstoffflocken, Vlies, PE	40 cm	60 cm	800 ml	60 / 4
4117	Zellstoffflocken, Vlies, PE	60 cm	60 cm	1000 ml	60 / 4
4118	Zellstoffflocken, Vlies, PE	60 cm	90 cm	1700 ml	30 / 4



Abri-Soft Basic wird als schützende Einwegunterlage für z.B. Betten und Stühle verwendet. Geeignet bei Inkontinenz, aber auch für unsterile Anwendungen. Die Unterlage hat versiegelte Ränder für optimalen Auslaufschutz. Für erhöhten Benutzerkomfort besteht die Oberfläche aus weichem Vliesmaterial. Die Verwendung von Einwegunterlagen reduziert das Kontaminationsrisiko.

Abri-Soft Basic bietet eine leichte bis mittlere Saugfähigkeit und ist in verschiedenen Größen erhältlich.



Waschbare Bett- und Sitzauflagen

Alltagssicherheit und Komfort

- Diskreter Extra-Schutz.
- Bestehend aus einer weichen Polyesteroberfläche und einem flüssigkeitsabsorbierenden Kern für ein trockenes Gefühl.
- Verfügt über eine atmungsaktive Flüssigkeitssperrschicht aus PU zum optimalen Hautschutz.
- Sieht aus und fühlt sich an wie normaler Stoff: diskret, geräuschlos und bequem.
- Kann min. 300 mal bei 95 °C gewaschen werden und ist trocknergeeignet.



✓ **Atmungsaktiv**

✓ **Flüssigkeits- undurchlässige Rückseite**



Unterlage, Abena Abri-Soft Waschbar



Art. Nr.	Material	Größe	Saugstärke Rothwell	Eigen-schaften	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
407300	PU, Polyester, Viskose	90x85cm	2500 ml		1 / 30
407400	PU, Polyester, Viskose	90x85cm	2500 ml	Mit Flügeln	1 / 30
4172	PU, Polyester, Viskose	85x75cm	2000 ml		1 / 36
4173	PU, Polyester, Viskose	85x75cm	2000 ml	Mit Flügeln	1 / 36

Abri-Soft Waschbar wird als Schutzunterlage für Betten und Matratzen verwendet. Sie besteht aus waschbarem Material und ist bei Inkontinenz für einen zusätzlichen, aber diskreten Schutz geeignet. Das Produkt verfügt über eine flüssigkeitsundurchlässige, aber atmungsaktive Sperrschicht. Die Oberfläche ist weich und angenehm und bietet dem Benutzer optimalen Komfort. Das Produkt hat abgerundete Ecken, um den Verschleiß beim Waschen zu reduzieren.

Abri-Soft Washable ist in einer Version mit seitlichen Flügeln erhältlich, die sich besonders für Personen eignet, die sich häufig im Bett bewegen oder drehen, da die Flügel ein Verrutschen der Unterlage verhindern.



Atmungsaktive waschbare Unterlage, Abena Pad



Art. Nr.	Material	Größe	Saugstärke Rothwell	Eigen-schaften	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
1000003357	PU, Polyester, Viskose	45x45cm	600 ml	Rutschfest	1 / 60

Zum Schutz von Rollstühlen, Autositzen und Stühlen mit Abena Pad – atmungsaktiv und waschbar für Sicherheit und Komfort am Tag. Bei Inkontinenz geeignet.

Zusätzlicher, aber diskreter Schutz mit unauffälliger dunkelblauer Farbe. Das Produkt verfügt über eine flüssigkeitsundurchlässige, aber atmungsaktive Sperrschicht. Für optimalen Benutzerkomfort sorgen ein rutschfestes Material auf der Rückseite und eine weiche und angenehme Oberfläche.



Einwegunterlagen mit Zellstofflagen

Die einfache und hygienische Wahl

- Ideal für unsterile Anwendungen - wie Wundversorgung, Blutentnahme sowie für Menschen, die an Inkontinenz leiden.
- Mit versiegelten Kanten und einer weichen Vliesoberfläche für optimale Sicherheit und Komfort.
- Unterschiedliche Zellstofflagenanzahl für unterschiedliche Anforderungen.
- Einfache und hygienische Entsorgung nach dem Gebrauch.

✓ **Auslaufschutz an den Seiten**

✓ **6-12 Zellstofflagen**

✓ **Flüssigkeits- undurchlässige Rückseite**



Einwegunterlage, Abena Abri-Cell



Art. Nr.	Material	Lagen	Breite	Länge	Saugstärke Rothwell	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
330222	Zellstoff, Vlies, PE	8 Lagen	40 cm	60 cm	450 ml	25 / 12
330224	Zellstoff, Vlies, PE	8 Lagen	60 cm	90 cm	800 ml	25 / 4
330228	Zellstoff, Vlies, PE	12 Lagen	60 cm	90 cm	1150 ml	25 / 4



Abri-Cell wird als schützende Einwegunterlage für z. B. Betten und Stühle verwendet. Sie eignet sich für unsterile Anwendungen wie Wundversorgung und Blutuntersuchungen, kann aber auch bei Inkontinenz verwendet werden. Die Unterlage verfügt über versiegelte Ränder für einen optimalen Auslaufschutz, und die Oberfläche ist mit einem weichen Vliesmaterial für einen erhöhten Benutzerkomfort bedeckt. Die Verwendung von Einwegunterlagen reduziert das Kontaminationsrisiko.





SCHUTZ- KLEIDUNG

Komfort und Hygiene von Kopf bis Fuß

Schutzkleidung ist unerlässlich für gute Hygienepraxis. Von der hygienischen Verpackung bis zur sofortigen Entsorgung nach dem Gebrauch erhöht die Schutzkleidung die Sicherheit und schützt vor Kreuzkontaminationen und Infektionen.

Setzen Sie mit unserem kompletten Sortiment an Schutzbekleidung neue Maßstäbe in Sachen Hygiene und Komfort. Sorgfältig entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Nutzern, medizinischem Personal und Pflegefachkräften, damit Sie immer das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse finden.

Infektionen und Kreuzkontamination vorbeugen

In unserem breiten Sortiment an Schutzkleidung finden Sie für jeden Benutzer und jeden Verwendungszweck ein Produkt, einschließlich dem Schutz von Bewohnern, Patienten, Besuchern und Pflegepersonal.

Unser Sortiment an Schutzkleidung bietet eine Reihe von Vorteilen:

- Weich und flexibel – für hohen Tragekomfort und Sicherheit
- Sauber und hygienisch – zur Vorbeugung von Infektionen und Kreuzkontaminationen
- Einfache und hygienische Entsorgung – für besseres Waschen, bessere Handlichkeit und Platzersparnis
- Hygienische Verpackung – gebrauchsfertig in verschiedenen Größen und Ausführungen.



SCHUTZ- KLEIDUNG Sortimentsübersicht

52 Medizinische Kopfbedeckung	Gesichtsmasken, Klipphauben
54 Schutzkittel und Schürze	
56 Speiselat	Einweg-Speiselat Erwachsene
56 Speiselat	Waschbarer Speiselat Erwachsene

Medizinische Kopfbedeckung

Bequemer und hygienischer Schutz

- Das Produktsortiment umfasst Klipphauben und Mundschutz
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur leichteren Unterscheidung bei der Anwendung in verschiedenen Bereichen und zur Vermeidung von Kreuzkontamination
- Hygienische Verpackung in Kartons mit perforierter Öffnung
- Unkomplizierte Entsorgung nach der Verwendung



✓ Breites Produktsortiment

✓ Hygienische Verpackung mit perforierter Öffnung



Gesichtsmaske mit Bändern, Typ II, Abena Classic



Art. Nr.	Farbe	Größe	Material	Schichtmenge	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
220898	Blau	17,5x9,5cm	PP, PE, Spandex	3-Schicht	50 / 20



Gesichtsmaske mit weichen, aber starken Bändern und Nasenklammer für einen guten Sitz. Die Maske hat einen geringen Atemwiderstand und einen hohen Filtrationsgrad für Bakterien. Sie ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Operationsräumen oder anderen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Hygieneanforderungen vorgesehen, um die Kreuzkontamination zu minimieren. Die Arbeitsumgebung ist vor Übertragung geschützt. Typ II, zugelassen nach EN 14683:2014.



Gesichtsmaske mit Bändern, Typ IIR, Abena Excellent



Art. Nr.	Farbe	Größe	Material	Schichtmenge	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
1000010124	Blau	17,5x9,5cm	PP, PE, Spandex	3-Schicht	50 / 20



Gesichtsmaske mit weichen, aber starken Bändern und Nasenklammer für einen guten Sitz. Die Maske hat einen geringen Atemwiderstand und einen hohen Filtrationsgrad für Bakterien. Sie ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Operationsräumen oder anderen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Hygieneanforderungen vorgesehen, um die Kreuzkontamination zu minimieren. Die Arbeitsumgebung ist vor Übertragung geschützt, und der Träger ist vor Spritzern oder Spritzwasser mit einem Druck von 120 mmHg geschützt. Typ IIR, zugelassen nach EN 14683:2014.



Gesichtsmaske mit elastischen Ohrenscllaufen, Typ IIR, Abena Excellent



Art. Nr.	Farbe	Größe	Material	Schichtmenge	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
1000010123	Blau	17,5x9,5cm	PP, PE, Spandex	3-Schicht	50 / 20




Gesichtsmaske mit weichen, aber starken elastischen Ohrenscllaufen und Nasenklammer für einen guten Sitz. Die Maske hat einen geringen Atemwiderstand und einen hohen Filtrationsgrad für Bakterien. Sie ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Operationsräumen oder anderen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Hygieneanforderungen vorgesehen, um die Kreuzkontamination zu minimieren. Die Arbeitsumgebung ist vor Übertragung geschützt, und der Träger ist vor Spritzern oder Spritzwasser mit einem Druck von 120 mmHg geschützt. Typ IIR, zugelassen nach EN 14683:2014.



Klipphaube, Abena Classic



Art. Nr.	Farbe	Größe	Material	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
210600	Blau	One size	PP	200 / 6
210601	Weiss	One size	PP	200 / 6

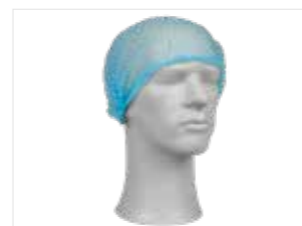

Klipphauben werden zum Schutz der Umgebung verwendet, wo ein hoher Hygienestandard erforderlich ist, z. B. in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.



Schutzkittel und Schürze

Schutz gegen Flüssigkeiten und Tropfen

- Flüssigkeitsresistent
- Die Schürzen sind in unterschiedlichen Abpackungen erhältlich
- Unkomplizierte Entsorgung nach der Verwendung

✓ **Stark und haltbar**
Vliesstoff Material

✓ **Bindebänder**
Nacken- und Taillenbänder



Isolationsschutzkittel, mit Bündchen und atmungsaktiver Rückseite, Abena Excellent

Art. Nr.	Farbe	Größe	Material	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
240190	Gelb	L	PP, PE	5 / 10
240191	Gelb	XL	PP, PE	5 / 10



Flüssigkeitsbeständiger Kittel mit atmungsaktiver Rückseite, Jersey-Bündchen sowie Hals- und Taillenband. Zum Schutz vor Kreuzkontamination, z. B. bei Vorliegen von Infektionskrankheiten.



Schutzkittel, mit Bündchen, Abena Excellent

Art. Nr.	Farbe	Größe	Material	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
210915	Blau	L	PP	5 / 10
210916	Blau	XL	PP	5 / 10




Flüssigkeitsabweisender Kittel mit Jersey-Bündchen sowie Hals- und Taillenband. Zum Schutz vor Kreuzkontamination, z. B. bei Vorliegen von Infektionskrankheiten.



Schürze, Abena

Art. Nr.	Farbe	Größe	Material	Stärke	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
100006715	Weiss	110x80cm	LDPE	30 micron	100 / 5
100006716	Weiss	130x80cm	LDPE	30 micron	100 / 5

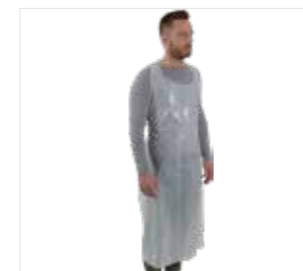


Einweg-Plastikschürze mit Halsschleufe und hinten schließenden Taillenbändern, geliefert am Block. Dient zum Schutz des Benutzers, wo ein hoher Hygienestandard erforderlich ist, z. B. im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelherstellung, in der Produktion oder in der Produktverpackung.



Speiselatz

Für jeden geeignet

- Einwegprodukte und waschbare Produkte für Erwachsene und Kinder
- Für zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten und Lebensmitteln, um das Wechseln der Kleidung zu vermeiden.
- Einwegspeiselätze sind einfach und hygienisch zu verwenden und nach Gebrauch zu entsorgen
- Waschbare Speiselätze sind eine gute Alternative, wenn eine höhere Absorption und eine langfristige Lösung erforderlich sind.
- Waschbare Speiselätze können bis zu 300 Mal gewaschen werden
- Einweg-Speiselätze halten die Kleidung trocken und sauber

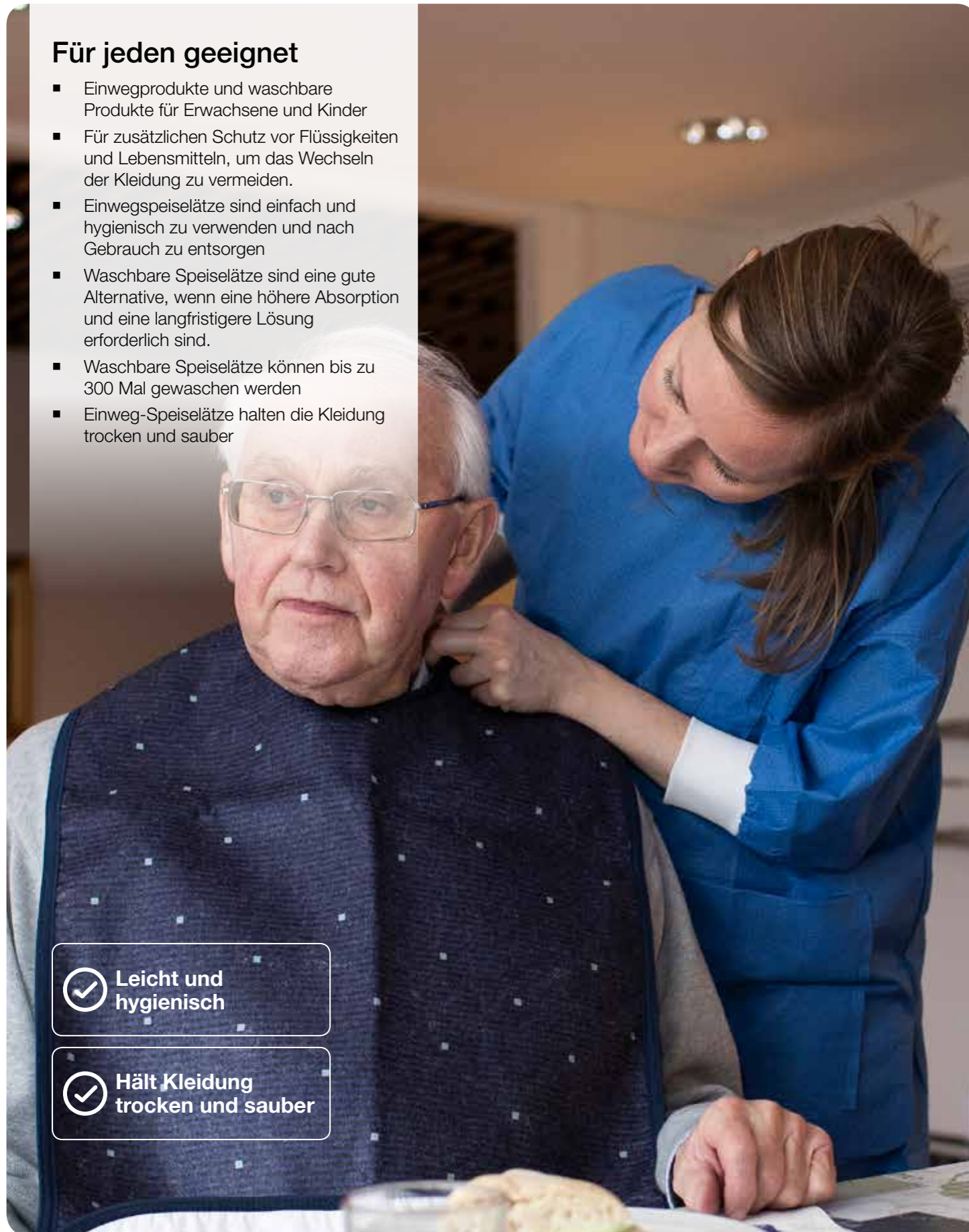

✔ Leicht und hygienisch

✔ Hält Kleidung trocken und sauber



Speiselatz, Abena Classic



Art. Nr.	Farbe	Größe	Material	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
330212	Weiss	70x38cm	Zellstoff, PE	100	9



Einweg-Speiselatz für Erwachsene, mit Verschluss im Nacken und Wendetasche. Die Wendetasche sorgt dafür, dass Lebensmittel und Flüssigkeiten verlässlich aufgefangen und ein Verschütten verhindert wird, während der verstärkte Nackenverschluss für eine gute und sichere Befestigung sorgt.

Die saugfähige Oberfläche und die flüssigkeitsundurchlässige Rückseite halten die Kleidung darunter sauber und trocken.



Speiselatz, Abena Classic



Art. Nr.	Farbe	Größe	Material	Packungen pro Karton	Karton pro Pal
408500	Blau	90x45cm	Polyester, Rayon, PVC, Metall	30	18



Waschbarer Speiselatz für Erwachsene, mit verstellbarer Tasche. Die saugfähige Oberfläche und die flüssigkeitsundurchlässige Rückseite halten die Kleidung darunter sauber und trocken. Ein 2-Knopf-Verschluss im Nacken ermöglicht die individuelle Anpassung.





HAUTPFLEGE

Gibt der Haut, was sie braucht. Nicht mehr und nicht weniger.

Die Haut ist das größte Organ des Körpers. Sie schützt den Körper vor Infektionen und ist für die Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Eine vollwertige Hautpflege und ordnungsgemäße Hygieneroutine ist für die Gesundheit des gesamten Körpers unerlässlich.

Die Hautpflegeserie von Abena wurde von Experten als sanfte, gesunde und vollwertige Produktreihe entwickelt. Unsere Produktberater helfen Ihnen gerne dabei, die optimale Kombination von Produkten für Ihre Pflegeroutinen zusammenzustellen.

Alle Produkte werden einer umfassenden Qualitätskontrolle, einschließlich dermatologischer Tests unterzogen. Sie garantieren die zertifizierte Allergikereignung und zertifizierte Umweltfreundlichkeit unserer Produkte. Sanfte Pflege, die der Haut dabei hilft gesund zu werden und das zu schützen, was Ihnen am nächsten ist – dazu fühlen wir uns verpflichtet.



Dermatologisch getestet.
Das Produkt ist klinisch auf Hautreizungen
und Allergien getestet.

Unser Hautpflegekonzept beinhaltet Produkte für alle Bedürfnisse, Hauttypen und Pflegesituationen. Für jeden Benutzer und jeden Gebrauch das passende Produkt. Nur aus den hochwertigsten Zutaten hergestellt.

- Benutzerfreundliche und hygienische Verpackung.
- Der pH-Wert entspricht dem natürlichen pH-Wert der Haut.
- Produkte, die viele Bedürfnisse abdecken – von der täglichen Pflege bis zur Spezialbehandlung.
- Hautpflegeprodukte von Abena erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009.
- Alle Produkte sind dermatologisch getestet. Wir führen Produkte im Sortiment, die mit dem Nordischen Umweltzeichen und als besonders asthma- und allergiefreundlich zertifiziert sind.



HAUTPFLEGE Sortimentsübersicht

60 Cremes und Lotionen Sortiment gelb

62 Spezialcremes und Salben Sortiment grau

Cremes und Lotionen



Allroundprodukte – für die tägliche Pflege der Haut

- Das gelbe Sortiment umfasst Cremes und Lotionen für normale und gefährdete Haut.
- Die meisten Produkte sind mit dem Nordischen Umweltzeichen und als besonders asthma- und allergiefreundlich zertifiziert.
- Produkte für jedes Körperteil.
- Feuchtigkeit regeneriert die Elastizität und Widerstandsfähigkeit der Haut.
- Regeneriert den natürlichen Hautschutzfilm.



Handcreme, Abena, 21% Lipide



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6965	Ohne Farbstoff und Parfüm	500 ml	5-6	6
6962	Ohne Farbstoff und Parfüm	75 ml	5-6	12
6656	Ohne Farbstoff, mit Parfüm*	500 ml	5-6	6
7770	Ohne Farbstoff, mit Parfüm*	75 ml	5-6	12

Milde, pflegende Handcreme. Zieht schnell in die Haut ein. Mit einem hohen Gehalt an pflanzlichen Ölen, die pflegen, ohne ein fettiges Gefühl zu hinterlassen. Enthält Glycerin, das die Feuchtigkeit in der Haut hält. Die Creme ist für alle Hauttypen geeignet und kann täglich verwendet werden.



* Produkte mit Parfüm tragen kein Asthma Allergy Siegel

Hautpflegelotion, Abena, 14% Lipide



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6653	Ohne Farbstoff und Parfüm	500 ml	5-6	6
6655	Ohne Farbstoff, mit Parfüm*	500 ml	5-6	6

Die Hautpflegelotion von Abena für normale bis trockene Haut ist eine leichte Feuchtigkeitslotion für die tägliche Pflege. Für Körper, Gesicht und Hände geeignet. Die Hautpflegelotion zieht schnell in die Haut ein und fettet nicht. Enthält pflegende und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe. In Tests wurde gezeigt, dass die Hautpflegelotion von Abena bis zu 8 Stunden lang reichlich Feuchtigkeit spendet. Die Creme enthält Olusöl und Sheabutter, die beide für ihre feuchtigkeitsspendende und pflegende Wirkung bekannt sind. Vorsichtig auftragen und verteilen. Dosierung gemäß Bedarf. Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



* Produkte mit Parfüm tragen kein Asthma Allergy Siegel

Hautpflegelotion, Abena, 28% Lipide



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6971	Ohne Farbstoff, ohne Parfüm	200 ml	5-6	6

Zur Pflege des gesamten Körpers. Optimal für normale oder mäßig trockene Haut. Enthält feuchtigkeitsspendende und pflegende Inhaltsstoffe.



Ölspray, Abena



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	Stück pro Karton
6666	Ohne Farbstoff, mit Parfüm	200 ml	12

Für die Pflege normaler bis trockener und sichtbar rissiger Haut geeignet. Es enthält hautpflegende Inhaltsstoffe für ein geschmeidiges Hautgefühl und bildet eine schützende Barriere auf der Haut. Das Ölspray trägt dazu bei, den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhalten. Enthält Vitamin E, das bei trockener Haut hilft und für seine antioxidativen und heilenden Eigenschaften bekannt ist, z. B. bei Sonnenbrand. Dank des Sprühkopfes ist das Ölspray hygienisch, praktisch und zeitsparend und kann für den gesamten Körper verwendet werden. Das Ölspray ermöglicht die Reinigung sehr zarter Haut und bietet gleichzeitig Schutz vor Feuchtigkeit und Wundliegen. Es kann auch zur Reinigung beim Verband- und Pflasterwechsel oder als Massageöl verwendet werden. Anwendung durch Aufsprühen auf die Haut. Dosierung gemäß Bedarf. Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Spezialcremes und Salben



Spezialcremes und Salben

- Das graue Sortiment umfasst Spezialcremes und Salben für erhöhte Anforderungen der Haut.
- Ideal für trockene, gereizte und rissige Haut.
- Erhältlich mit oder ohne Barrierewirkung sowie für die Intimpflege.
- Ideal zur Stabilisierung des natürlichen Fetthaushalts der Haut.
- Beugt Hautalterung vor und hilft, die Haut wiederherzustellen und zu erhalten.
- Reduziert Rötungen und fördert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut.
- Benutzerfreundliche, flexible Verpackungen und Größen.
- Inklusive Produkte mit Sprühfunktion – für wunde und empfindliche Bereiche.
- Dermatologisch getestet.
- Frei von Farbstoffen und Parfüm.



Wussten Sie schon...
25% aller Pflegeheimbewohner leiden unter IAD! Erfahren Sie wie man IAD vorbeugen kann
> www.abena.at



Hautpflegesalbe, Abena, 41% Lipide



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6659	Ohne Farbstoff und Parfüm	150 ml	5-6	12



Die Abena Hautpflegesalbe mit einem Fettgehalt von 41 % ist ideal für sehr trockene und/oder gereizte Haut. Die spezielle Pflegeformel trägt dazu bei, den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhalten. Es hilft, das Hautbild zu verbessern und die Haut zu regenerieren. In Tests wurde gezeigt, dass die Hautpflegesalbe von Abena über hervorragende feuchtigkeitsspendende Eigenschaften mit langer Wirkungsdauer verfügt.

Darüber hinaus bietet die Hautpflegesalbe eine wirksame Barriere, mit der die Hautgesundheit unterstützt und dem Risiko einer Inkontinenz-assoziierten Dermatitis (IAD) bzw. Windeldermatitis vorgebeugt wird.

Frei von Farbstoffen und Parfüm.
Bereits in kleinen Mengen wirksam. Dünn auftragen und vorsichtig verteilen. Dosierung gemäß Bedarf. Für eine häufige Anwendung geeignet. Anschließend die Creme kurz einziehen lassen. Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet.



Zinksalbe, Abena, 20% Zinkoxid



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6963	Ohne Farbstoff und Parfüm	100 ml	4-5	6



Die Zinksalbe von Abena (Wasser-in-Öl-Emulsion) ist ideal für Haut, die einen speziellen Schutz benötigt. Sie enthält 20 % Zinkoxid, das für seine antiseptischen Eigenschaften bekannt ist, und beruhigt gereizte und/oder gerötete Haut. Die Salbe hinterlässt bis zu 8 Stunden lang eine schützende Barriere auf der Haut und minimiert so den Kontakt mit irritativen Substanzen. Das Produkt ist besonders dann hilfreich, wenn ein Risiko für Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD) bzw. Dekubitus besteht. Kann auch bei Babys mit Windeldermatitis angewendet werden. Zusätzlich fügt die Zinksalbe der Haut reichlich Feuchtigkeit hinzu, da sie Allantoin enthält, das die Haut beruhigt.

Frei von Farbstoffen und Parfüm. Für die tägliche Hautpflege/-regeneration. Für eine häufige Anwendung geeignet. Dünn auftragen und vorsichtig verteilen. Dosierung gemäß Bedarf. Einfach aufzutragen und leicht wieder zu entfernen. Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Zinkspray, Abena, 10% Zinkoxid



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
1000003933	Ohne Farbstoff und Parfüm	100 ml	5-6	6



Das Zinkspray von Abena schützt und regeneriert die Haut. Die Wirkdauer des Sprays für die natürliche Hautregeneration beträgt bis zu 24 Stunden. Aufgrund der Sprühfunktion wird unangenehme Reibung auf der Haut minimiert. Der Zerstäuber verringert außerdem das Kontaminationsrisiko.

Das Zinkspray trägt langfristig zu einer Verbesserung der Hautbarriere bei, optimiert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und schützt so vor potenziellen Reizungen (beispielsweise durch Urin). Zinkoxid ist für seine antiseptischen Eigenschaften bekannt. Das Produkt wurde speziell zur Beruhigung gereizter Haut entwickelt. Unsere Zinksprays haben sich bereits bei der Förderung der Hautgesundheit bewährt. Für Kinder und Erwachsene geeignet.

Mit Calendula und Kamille zur Beruhigung und Unterstützung der natürlichen Hautregeneration.
Sprüht mit der Thin-Layer-Technologie (TLT) eine hauchdünne Schicht auf die Haut.
Zur Verwendung bei Hautrötung und den ersten sichtbaren Anzeichen von IAD.
Vor Gebrauch schütteln. In einem Abstand von ca. 10–15 cm vorzugsweise mit leicht kreisenden Bewegungen aufsprühen.
Kein weiteres Einreiben der Creme erforderlich. Bei jedem Wechsel der Inkontinenzprodukte verwenden.
Dosierung gemäß Bedarf. Frei von Farbstoffen und Parfüm.



Intensivcreme, Abena, 70% Lipide



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6970	Ohne Farbstoff und Parfüm	200 ml	4-5	12



Die Intensivcreme von Abena ist ideal zur Pflege aller Hauttypen, um die Wiederherstellung des natürlichen Feuchtigkeitsgehalts der Haut zu unterstützen. Die Creme eignet sich für die Pflege von sehr trockener, gereizter und geschädigter Haut sowie bei atopischer Dermatitis, Ekzem, Hautausschlag und Psoriasis. Der hohe Fettgehalt von 70 % verbessert die Schutzfunktion der Haut, ohne ein fettiges Gefühl zu hinterlassen. Durch den hohen Fettgehalt zur Pflege von Händen, Körper, Gesicht und auch Füßen geeignet. Das Creme hat besondere Barriereigenschaften, die bis zu 8 Stunden lang bestehen bleiben. Für Kinder und Erwachsene geeignet. Die Creme beeinträchtigt nicht die Wirkung von Chlorhexidin.

Frei von Farbstoffen und Parfüm.
Für die tägliche Pflege trockener und empfindlicher Haut. Für eine häufige Anwendung geeignet.
Dünn auftragen und vorsichtig verteilen. Dosierung gemäß Bedarf.
Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Hautschuttsalbe, Abena, 33% Lipide



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6992	Ohne Farbstoff und Parfüm	30 ml	4,5	150



Die Abena Hautschuttsalbe mit einem Fettgehalt von 33 % ist ideal für sehr trockene und/oder gereizte Haut. Das Produkt kann als wasserabweisende Salbe an beanspruchten Hautpartien wie unter Inkontinenzprodukten, in Hautfalten und bei Reizungen im Bereich der Nase und den Mundwinkeln verwendet werden. Auf die trockene Haut auftragen. Die spezielle Pflegeformel trägt dazu bei, den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhalten. Dadurch wird das Hautbild verbessert. In Tests wurde gezeigt, dass die Creme über hervorragende feuchtigkeitsspendende Eigenschaften mit langer Wirkungsdauer verfügt. Darüber hinaus bietet die Creme eine wirksame Barriere, mit der die Hautgesundheit unterstützt und dem Risiko einer Inkontinenz-assoziierten Dermatitis (IAD) vorgebeugt wird.

Bereits in kleinen Mengen wirksam. Dünn auftragen und vorsichtig verteilen. Dosierung gemäß Bedarf. Für eine häufige Anwendung geeignet. Anschließend die Creme kurz einziehen lassen.
Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Aktiv-Gel, Abena



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6654	Ohne Farbstoff und Parfüm	250 ml	5-6	6



Das Abena Aktiv-Gel enthält natürliche und reine ätherische Ölen wie Pfefferminze, Eukalyptus und Menthol, die die Durchblutung anregen. Mit einem feuchtigkeitsregulierenden Mittel, mit dem einem Austrocknen der Haut vorgebeugt wird. Kann bei Gelenkschmerzen, Zerrungen, Verstauchungen und Prellungen eingesetzt werden. Das Aktiv-Gel hat einen kühlenden Effekt und sorgt für ein angenehmes, entspanntes Gefühl. Erleichtert das Atmen.

Ohne Konservierungsstoffe hergestellt.

Dosierung gemäß Bedarf.
Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Alles rund um Hygiene

Folgt einem ganzheitlichen Ansatz für eine optimale persönliche Hygiene

- Fördert das Gefühl von Sauberkeit und Wohlbefinden
- Reduziert das Risiko von Komplikationen, wie Geschwüre, IAD und Ausbreitung von Infektionskrankheiten
- Verbessert die Lebensqualität **ENTSCHEIDEND**


Vermeiden Sie resistente Bakterien und achten Sie auf eine gute Handhygiene.



Ganzheitlicher
Ansatz für optimale persönliche Hygiene

Einwegprodukte zum wasserlosen Waschen

reduzieren das Infektionsrisiko und werden von Patienten und Pflegepersonal bevorzugt.

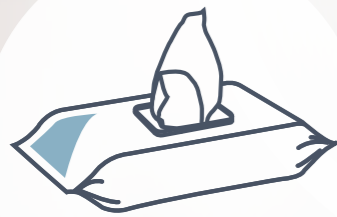

Handschuhe sind Ihr bester Freund

Schutzkleidung ist das Rückgrat einer guten Hygiene. Sie beinhaltet Handschuhe, Schürzen, Overalls, Masken und mehr.

Körperpflege

Intimwäsche und Rasieren erfordert besondere Aufmerksamkeit.



Abfall mit Vorsicht behandeln

mit Produkten, die auf eine einfache und hygienische Entsorgung und moderne Abfallentsorgungssysteme ausgelegt sind.





KÖRPERPFLEGE

Alles, was Sie zum Wohlfühlen brauchen

Der Zugang zu einer Dusche wird oft als selbstverständlich vorausgesetzt, aber die persönliche Hygiene ist für die Lebensqualität von grundlegender Bedeutung. Jede Person sollte unabhängig von ihrer körperlichen Verfassung die Möglichkeit zur Körperwäsche haben. Obgleich manche mehr Hilfe benötigen, ist die persönliche Hygiene für das Wohlbefinden von größter Bedeutung.

Unser Körperpflegesortiment basiert auf einem ganzheitlichen Hygieneansatz. Durch unser breites Angebot von sicheren und anwendungsfreundlichen Waschlösungen ist es möglich, Stress und körperliche Belastung für Pflegepersonal und Bewohner zu minimieren. Und unsere Produkte verhindern Kreuzkontaminationen, Ausbreitung von Infektionen und unangenehme Hautzustände wie inkontinenzbedingte Dermatitis (IAD).

Tipp: unser Sortiment beinhaltet Lösungen zum Waschen ohne Wasser - eine großartige Lösung um IAD vorzubeugen

Produkte für jeden Benutzer und jeden Verwendungszweck. Von der traditionellen Körperpflege mit Wasser und Seife bis hin zu den neuen feuchten Waschhandschuhen.

- Eine breite Palette von allergikerfreundlichen und mit dem Umweltzeichen versehenen Produkten – um die Haut zu schützen und gesund zu erhalten.
- Optimale Lösungen für das Waschen mit und ohne Wasser.
- Intelligente, nutzerfreundliche und hygienische Verpackung.
- Langlebige und hochwertige Produkte, gemäß der Devise: weniger ist mehr – zur Vermeidung unnötiger Zusatzstoffe.
- Sofort einsetzbar und einfach zu entsorgen
- Farbcodes erleichtern die Zuordnung zum Einsatzzweck.
- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Zusammensetzung, Inhaltsstoffe und Anwenderfreundlichkeit.



KÖRPERPFLEGE Sortimentsübersicht

- 70 Waschen ohne Wasser Sortiment grün
- 72 Waschen ohne Wasser - gebrauchsfertig Sortiment grün
- 74 Waschen mit Wasser Sortiment blau

Waschen ohne Wasser



Die neue Art der Körperwäsche

- Eine gute Alternative zum herkömmlichen Waschen mit Wasser.
- Hygienische, zeitsparende und komfortable Lösung, insbesondere für bettlägerige oder unbewegliche Personen oder bei eingeschränktem Zugang zu Wasser.
- Das grüne Sortiment umfasst Waschlotionen, Reinigungsschäume und Körperwaschmittel zum Waschen ohne Wasser.
- Für ein frisches und sauberes Gefühl können die Tücher und Waschlappen aus dem grünen Sortiment verwendet werden.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Größen und Falzungen.
- Hautfreundlich – durch sorgfältig angepasste pH-Werte.
- Hygienische, wirtschaftliche und umweltfreundliche Verpackung.
- Asthma-, Allergie- und Umweltlabel zertifizierte Produkte als sicherste Wahl für Haut und Umwelt.



Weitere Informationen zu Waschen ohne Wasser finden Sie unter www.abena.at



Reinigungsschaum, Abena



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
150224	Frei von Farbstoffen, mit Duftstoffen	400 ml	5-6	6



Der Abena Reinigungsschaum ist mild und sanft und dient der gründlichen Reinigung im Rahmen der Körperpflege. Der Schaum ist sehr einfach aufzutragen und ist sanft zur Haut. Er ist ideal beim Wechseln von Inkontinenzprodukten, da Stuhlrückstände gelöst und unangenehme Körpergerüche wirkungsvoll entfernt werden. Die spezielle Formel des Reinigungsschaums minimiert Hautreibung und hat feuchtigkeitsspendende und hautpflegende Eigenschaften. Vorsichtig auftragen, einige Sekunden lang einwirken lassen, damit z. B. Stuhlrückstände gelöst werden können, und die überschüssige Lotion dann mit einem Waschlappen oder einem anderen Produkt entfernt werden kann. Das Produkt enthält spezielle Inhaltsstoffe für die empfindliche Haut (Bisabolol, Panthenol, Extrakt aus Hamamelisblättern). Für Kinder und Erwachsene geeignet.

Für den täglichen Gebrauch. Dosierung nach Bedarf.
Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Waschhandschuh, Abena



Art. Nr.	Größe	Material	Eigenschaften	Farbe	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
491910	23x16cm	Polyester	Mit Ultraschallsiegelung	Weiss	50 / 20



Waschhandschuhe für die Körperpflege aus einer Polyester- und Viskose-Mischung. Das Material ist sehr weich und daher sehr gut zum Waschen von Patienten geeignet. Sie haben eine ausgezeichnete Saugkraft und Festigkeit auch im nassen Zustand. Das Produkt hat eine versetzte Öffnung, sodass es vom Benutzer leichter angezogen werden kann. Normalerweise wird ein Nitrilhandschuh verwendet, um die Hände vor Bakterien und Viren zu schützen. Der Waschhandschuh hat seitliche Nähte. Er ist einfach zu verwenden und nach dem Gebrauch einfach über den Müll zu entsorgen. Geeignet für die Anwendung mit Reinigungsschaum.



Airlaid-Waschlappen aus Papier, Abena



Art. Nr.	Größe	Material	Schichtmenge	Stück pro Packung	Packungen pro Karton
4924	30x20cm	Airlaid	1	100	15



Airlaid-Waschlappen aus Papier für die Körperpflege. Airlaid-Produkte sind besonders weich und daher sehr gut zum Waschen von Patienten geeignet. Das Material ist luftbehandelt, wodurch es besonders weich und saugfähig ist (6-faches Gewicht), während es gleichzeitig eine höhere Nassfestigkeit als herkömmliches Papier aufweist.

Die Waschlappen nach dem Gebrauch über den Restmüll entsorgen.

Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Waschen ohne Wasser - gebrauchsfertig



Für eine saubere, frische und komfortable Ganzkörperpflege


- Bietet bettlägerigen Patienten ein komplettes Bad ohne die Verwendung von Begleitprodukten, da die reinigende und feuchtigkeitsspendende Wirkung durch die Produkte selbst gegeben ist.
- Ein wasserloses Bad spart Mühe und Zeit, da kein Wasser, keine Seife und kein Nachspülen und Trocknen erforderlich ist.
- Beinhaltet feuchte Waschhandschuhe, Shampoo-Hauben für die wasserlose Haarwäsche, Feuchtpflegetücher und Inkontinenzhandschuhe.
- Anwendungsfreundlichere Lösung für Pflegekräfte.
- Bequeme, hygienische und sorgfältige Reinigung.
- Steht in Verbindung zur Verbesserung des Hautzustandes bei Hautschäden wie IAD (Inkontinenzbedingte Dermatitis).
- Hautfreundlich – durch sorgfältig angepasste pH-Werte.
- Asthma-, Allergie- und Umweltlabel-zertifizierte Produkte – die sicherste Wahl für Haut und Umwelt.



ACHT-SCHRITTE-VERFAHREN Acht Schritte für eine komplette Körperreinigung ohne Wasser

Tägliche Pflege

- 1 Gesicht, Hals und Brust
- 2 Rechter Arm, Achselhöhle und rechte Körperseite
- 3 Linker Arm, Achselhöhle und linke Körperseite
- 4 Vorderer Intimbereich
- 5 Rechtes Bein und rechter Fuß
- 6 Linkes Bein und linker Fuß
- 7 Nacken und Rücken
- 8 Hinterer Intimbereich

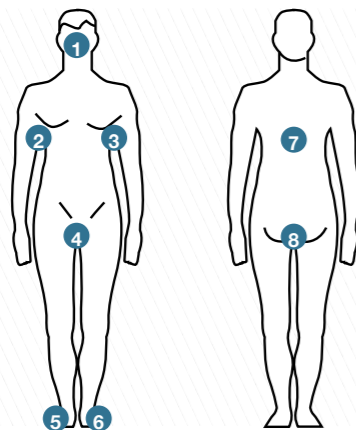

Feuchte Waschhandschuhe, Abena



Art. Nr.	Größe	Material	Farbe	pH-Wert	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
540051	22x15cm	Polyester, Viskose	Weiss	4-5	8 / 30



Die feuchten Waschhandschuhe von Abena zum Einmalgebrauch haben eine angenehm reinigende und feuchtigkeitsspendende Wirkung. Sie bieten eine gute Alternative zum herkömmlichen Waschen mit Wasser und Seife. Die Einmalwaschhandschuhe entfernen Verschmutzungen, unangenehme Gerüche und sind sehr hygienisch in der Anwendung.

Umfassende an der Radboud-Universität in Holland durchgeführte Untersuchungen haben gezeigt, dass sich das Hautbild durch die Verwendung unserer feuchten Waschhandschuhe langfristig verbessert. Darüber hinaus fördert das Produkt die Ganzkörperwäsche, da die Verpackung Hinweise zur einfachen Verwendung für den Benutzer aufweist.

Die Ganzkörperwäsche bietet zudem die Möglichkeit, den Zustand der Haut zu beurteilen und potenziellen Hautleiden in den frühesten Phasen entgegenzuwirken. Dies verhindert, dass eine Hauterkrankung wie die Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD) zum Besorgnis werden kann. Aufgrund der speziellen Prägung der Handschuhe nehmen sie Schmutz auf und tragen zu einer sanften Hautreinigung bei. Die Handschuhe fühlen sich aufgrund ihrer Dicke angenehm weich und baumwollartig auf der Haut an und reiben weniger beim Waschen.

Die Produkte können in der Mikrowelle (30 Sekunden bei max. 800 W) erwärmt werden, um ein angenehmes Gefühl bei der Verwendung zu erzielen. Dieses Produkt wird im Gesundheitswesen immer häufiger eingesetzt, da sowohl das Pflegepersonal als auch die Patienten diese Methode im Allgemeinen gerne anwenden. In Bezug auf die Prävention von Kreuzkontaminationen und Infektionen ist dies ein hochwirksames Produkt. Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Feuchtpflegetücher, Abena



Art. Nr.	Größe	Material	Eigen- schaften	Farbe	pH-Wert	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
6595	20x27cm	Spunlace nonwoven	Mit Kunst- stoffdeckel	Weiss	4-5	80 / 12
1000006338	20x18cm	Polyester, Viskose	Mit Kunst- stoffdeckel	Weiss	5-7	80 / 16



Die Abena Feuchtpflegetücher bestehen aus einer Polyester- und Viskose-Mischung und sind eine gute Alternative zum herkömmlichen Waschen mit Wasser und Seife. Das Produkt dient zur Körperpflege und kann am gesamten Körper angewendet werden. Das Feuchtpflegetuch entfernt Schweiß und Gerüche und ist hygienisch zu verwenden, da es sich um ein Einwegprodukt handelt.

Die Feuchtpflegetücher nach dem Gebrauch über den Restmüll entsorgen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Shampoo-Haube, Abena



Art. Nr.	Größe	Material	Eigen- schaften	Farbe	pH-Wert	Stk pro Pkg/ Pkg pro Karton
491917	21x16x4,5cm, Ø32cm	PET, Viskose	Für die Trockenwäsche, frei von Farb- und Duftstoffen	Weiss	6	1 / 30



Die Abena Shampoo-Haube mit Shampoo und Spülung kann für bettlägerige Personen verwendet werden. Die Haube wird bei Raumtemperatur verwendet oder kann für 15–20 Sekunden in der Mikrowelle erhitzt werden (max. 800 W). Die Temperatur bei Verwendung sollte max. 40 °C betragen. Das Haar wird 2–3 Minuten lang durch die Haube massiert und dann die Haube entfernt. Anschließend ist das Haar fertig gewaschen. Das Abspülen mit Wasser ist nicht notwendig.

Die Haube ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte danach über den Restmüll entsorgt werden.



Waschen mit Wasser



Für alle Anforderungen der täglichen Hygiene und Pflege

Zum traditionellen Waschen mit Wasser deckt Abena die gesamte Produktpalette für alle Hauttypen ab.

- Das blaue Sortiment umfasst Seifen und Shampoos.
- Für normale, beanspruchte, trockene und empfindliche Haut.
- Nur milde Wirk- und Inhaltsstoffe.
- Hautfreundlich – durch sorgfältig angepasste pH-Werte.
- Leicht abwaschbare, nicht reizende Produkte.
- Wirtschaftliche, benutzer- und umweltfreundliche Verpackungen.
- Die Verpackungen wurden zur hygienischen Benutzung und Entsorgung entworfen.
- Asthma-, Allergie- und Umweltlabel-zertifizierte Produkte – die sicherste Wahl für Haut und Umwelt.



Dusch- und Badeseife, Abena



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6662	Ohne Farbstoff, mit Parfüm	500 ml	4-5	6



Die Abena Dusch- und Badeseife ist gleichermaßen wirksam für Haar und Körper. Der pH-Wert der Seife ist auf den pH-Wert der Haut abgestimmt. Dadurch ist das Produkt vielseitig und in unterschiedlichen Situationen einsetzbar.

Das Produkt enthält Duftstoffe, aber ist frei von Farbstoffen.

Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Dusch- und Badeöl, Abena



Art. Nr.	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6663	Ohne Farbstoffe, mit Parfüm, mit Aloe vera	500 ml	4-5	6



Das Dusch- und Badeöl von Abena hat eine sehr gute Waschwirkung und verhindert, dass sich zarte Haut in trockene Haut verwandelt. Vermischt sich mit Wasser und schäumt gut.

Geeignet als Haarshampoo für Personen mit besonders trockener Kopfhaut. Bei Personen mit tiefen Hautfalten sollte dieses Öl anstelle von Seife verwendet werden. Enthält ätherische Öle, natürliches Jojobaöl und Aloe vera, die gerötete und zarte Haut beruhigen und Entzündungen reduzieren. Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.

Für Kinder und Erwachsene geeignet. Der pH-Wert ist sorgfältig auf den pH-Wert der Haut eingestellt und trägt so zu ihrem Schutz bei.

Nur zur äußerlichen Anwendung. Kontakt mit den Augen vermeiden.



Haarshampoo, Abena



Artikelnummer	Eigenschaften	Inhalt	pH-Wert	Stück pro Karton
6800	Ohne Farbstoffe und Parfüm	500 ml	5-6	6
6664	Ohne Farbstoffe, mit Parfüm*	500 ml	5-6	6



Das Abena Haarshampoo ist ein mildes und pflegendes Shampoo für alle Haartypen. Sorgt für sauberes, weiches Haar und ist leicht ausspülbar, sodass keine Seifenreste zurückbleiben, die die Kopfhaut reizen können. Vielseitig einsetzbar und mit nachhaltiger Wirkung. Das Produkt ist von einem Drittanbieter zertifiziert, sodass es bedenkenlos für die ganze Familie verwendet werden kann.

Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Das Haarshampoo enthält keine Farbstoffe und ist mit und ohne Duftstoffe erhältlich.



* Produkte mit Parfüm tragen kein Asthma Allergy Siegel

IAD-Prävention

1 Sanfte
Reinigung

Feuchtigkeits-
spendend

2

3
Barriere
auftragen

Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD)

Die Inkontinenz-assoziierte Dermatitis ist eine irritativ toxische Kontaktdermatitis, verursacht durch den Kontakt mit Urin und/oder Stuhl. Folgende Risikofaktoren können zur Entwicklung von IAD beitragen: Flüssiger Stuhl mit einer erhöhten Entleerungsfrequenz, hohes Lebensalter, Mobilitätseinschränkung, Pflegebedürftigkeit, sensorische Einschränkungen, schlechter Hautzustand, schlechter Ernährungszustand.

Folgen Sie zur IAD-Prävention diesem strukturierten dreistufigen Hautpflegeprogramm von Abena

1. Reinigen Sie die Haut sanft, am besten ohne Wasser
2. Tragen Sie Feuchtigkeitscreme oder Lotion auf, um die Haut zu schützen
ODER
3. Tragen Sie eine Barrierecreme, Lotion oder ein Barrierspray auf, um die Regeneration der Haut zu unterstützen



FACHKUNDIGER RAT

Unsere Produktberater helfen Ihnen dabei, das richtige Hautpflegeprogramm und die optimalen Lösungen für Ihre Bedürfnisse zu finden.



Lassen Sie ZINK
zur Anwendung
kommen

25%

25 % der Pflegeheimbewohner haben ein erhöhtes Risiko für die **Entwicklung von IAD**

Erfahre mehr über IAD unter
www.abena.at



HANDSCHUHE

Die sichere und praktische Wahl für jede Aufgabe

Die Verhinderung von Kreuzkontaminationen und die Verhinderung der Übertragung von Infektionen wird im Gesundheitswesen immer wichtiger. Wenn es um Hygiene und Infektionsprävention geht, sind Handschuhe Ihre besten Verbündeten.

Handschuhe spielen eine zentrale Rolle, um Ihre Sicherheit und Hygiene in allen Bereichen zu gewährleisten - von der medizinischen Versorgung bis hin zum Umgang mit Lebens- und Reinigungsmitteln. Hochwertige und zweckmäßige Handschuhe sind unerlässlich, um eine sichere und hygienische Umgebung für Patienten, Mitarbeiter und Besucher zu gewährleisten.

Mit der Wahl eines Abena-Handschuhs können Sie sich auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handschuh- und Gesundheitsbranche verlassen. Unsere Handschuhexperten helfen Ihnen bei der Suche nach der richtigen Lösung für den richtigen Zweck, indem sie Sie über Materialien, Allergien und Umweltaspekte beraten.

Handschuhe sind ein wichtiges Werkzeug, um krankenhausbedingte Infektionen und Kreuzkontamination zu vermeiden

Antimikrobielle Handschuhe - die ersten nicht auslaugenden antimikrobiellen Nitrilhandschuhe. Erfahren Sie mehr auf www.abena.at



HANDSCHUHE Sortimentsübersicht

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|
| 86 | Medizinische Untersuchungshandschuhe | Nitril |
| 90 | Medizinische Untersuchungshandschuhe | Nitril
Antimikrobiell |
| 92 | Medizinische Untersuchungshandschuhe | Latex |
| 92 | Zubehör | |

Gleiche Qualität - in einem neuen Design

Wir haben die Handschuhe, die Sie kennen und denen Sie vertrauen in einen neuen Look gepackt



FARBKODIERUNG



Violett: X-Small



Grün: Small



Orange: Medium



Blau: Large



Braun: X-Large



Dunkelrot: XX-Large

SO WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN HANDSCHUH AUS

Anwendung:	Nitril	Latex	Vinyl
Patientenversorgung	E	E	G
Körperflüssigkeiten, einschließlich Blut	E	E	NG
Zytostatika (Chemotherapie)	E	NG	NG
Ölbasierte Cremes (einschließlich Hormoncremes)	E	NG	NG
Reinigungsarbeiten von kurzer Dauer	E	E	E
Geringer Schutz vor Chemikalien			
Umgang mit Lebensmitteln	E	E	G

E Empfohlen für den Gebrauch

G Geeignet für die Verwendung





NG Nicht für den Einsatz geeignet

* nur für nicht fettige Lebensmittel


CLASSIC UND EXCELLENT

Jedes Material - Nitril, Latex, Vinyl - ist unterteilt in Classic für optimale Anwendungen und Excellent für spezielle Anwendungen oder verbesserten Schutz.

SYMBOLE

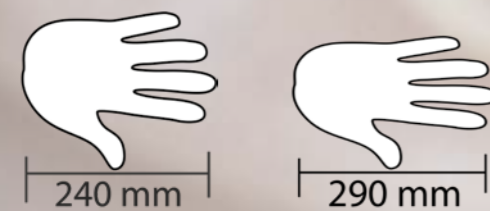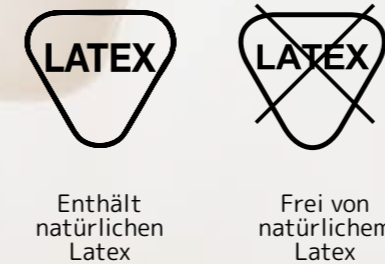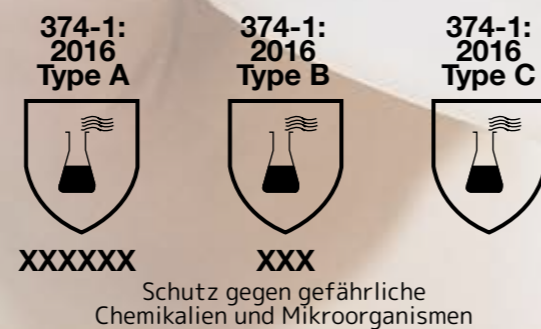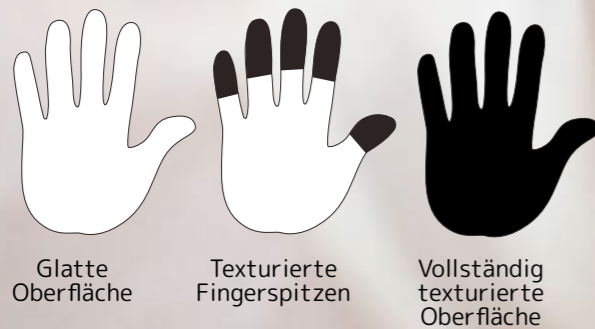

Beschreibt die Länge des Handschuhs.

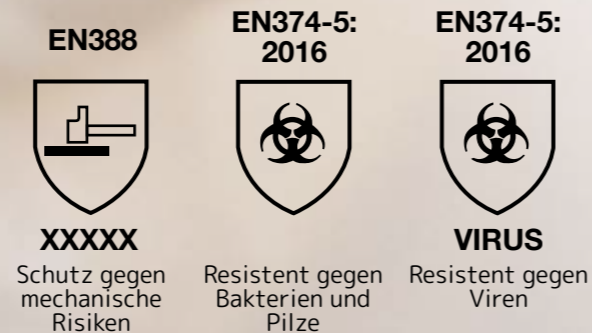

Beschreibt die Haftung des Handschuhs.

GESETZGEBUNG

NORMEN

Medizinische Handschuhe:

Medizinische Handschuhe müssen der Richtlinie für Medizinprodukte (MDD93 / 42 / EWG) entsprechen. Für Produkte, die nach Mai 2020 hergestellt werden, gilt die Richtlinie (EU) 2017/745 (MDR).

Um die Konformität nachzuweisen, werden die Handschuhe nach mehreren einheitlichen Normen geprüft:

- EN 455-1** Medizinische Handschuhe zum Einmalgebrauch -
Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Lochfreiheit
- EN 455-2** Medizinische Handschuhe zum Einmalgebrauch -
Teil 2: Anforderungen und Prüfung der physischen Eigenschaften
- EN 455-3** Medizinische Handschuhe zum Einmalgebrauch -
Teil 3: Anforderungen und Prüfung der biologischen Bewertung
- EN 455-4** Medizinische Handschuhe zum Einmalgebrauch -
Teil 4: Anforderungen und Prüfung zur Haltbarkeitsbestimmung

VORSCHRIFTEN

Die Rechtsvorschriften für die Kennzeichnung und Einstufung von Handschuhen sind oft schwer zu verstehen. Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über die relevanten Richtlinien, Vorschriften und Normen für die von Abena verkauften Handschuhe.

Allgemeine Informationen:

Das CE-Zeichen zeigt an, dass ein Produkt in jedem Land der Europäischen Union legal zum Verkauf angeboten werden darf. Der Verkauf von Handschuhen in der EU erfordert, dass das Produkt mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet ist. Handschuhe können als medizinisches Gerät, als persönliche Schutzausrüstung oder als beides CE-gekennzeichnet sein. Um als beides gekennzeichnet zu werden, müssen die Handschuhe den unten beschriebenen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.



Was ist ein medizinischer Handschuh?



Ein medizinischer Handschuh wird definiert als ein Handschuh, der für den Einsatz im medizinischen Bereich bestimmt ist, um Patient und Anwender vor Kreuzkontaminationen zu schützen.

Medizinische Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Die sichere Wahl

- Ideal für eine Vielzahl von Aufgaben und Abläufen.
- Bietet hohen Schutz und ist sehr angenehm zu tragen.
- Fester Sitz ermöglicht ein feines Tastgefühl - sehr durchstichfest.
- Durch das starke Nitrilmaterial lassen sich die Handschuhe sehr leicht anziehen.
- Die sichere Wahl in Situationen mit hohem Infektionsrisiko oder Risiko von Kreuzkontamination.
- Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien.
- Die bevorzugte Wahl für Menschen mit Latexallergien.
- Das Sortiment umfasst die NEUEN Abena Antimikrobiellen Handschuhe - die ersten, nicht auslaugenden, antimikrobiellen Handschuhe.



WUSSTEN SIE,

dass Nitrilhandschuhe aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) hergestellt werden? NBR wird auch als synthetischer Kautschuk bezeichnet, und die Handschuhe werden aufgrund ihrer hervorragenden Schutzeigenschaften und des fehlenden Gehalts an Latexproteinen häufig verwendet.



Untersuchungshandschuhe, Abena Classic



Art. Nr.	Material	Eigen-schaften	Größe	Farbe	Stk pro Pkg/Pkg pro Karton/ Karton pro Pal
290820	Nitril	Puderfrei	XS	Blau	200 / 10 / 54
290821	Nitril	Puderfrei	S	Blau	200 / 10 / 54
290822	Nitril	Puderfrei	M	Blau	200 / 10 / 54
290823	Nitril	Puderfrei	L	Blau	200 / 10 / 54
290824	Nitril	Puderfrei	XL	Blau	200 / 10 / 54

Elastischer Untersuchungshandschuh, der sich während des Gebrauchs an die Form der Hand anpasst. Kann für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden, z. B. Reinigungs-, Pflege- und Labortätigkeiten, Handhabung von Lebensmitteln, Umgang mit Medikamenten, Zytostatika und Hormoncremes. Enthält keine Latexproteine und ist daher bei Latexallergien unbedenklich.




Untersuchungshandschuhe, Abena Classic



Art. Nr.	Material	Eigen-schaften	Größe	Farbe	Stk pro Pkg/Pkg pro Karton/ Karton pro Pal
290411	Nitril	Puderfrei	XS	Weiss	150 / 10 / 54
290412	Nitril	Puderfrei	S	Weiss	150 / 10 / 54
290413	Nitril	Puderfrei	M	Weiss	150 / 10 / 54
290414	Nitril	Puderfrei	L	Weiss	150 / 10 / 54
290415	Nitril	Puderfrei	XL	Weiss	150 / 10 / 54

Elastischer Untersuchungshandschuh, der sich während des Gebrauchs an die Form der Hand anpasst. Kann für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden, z. B. Reinigungs-, Pflege- und Labortätigkeiten, Handhabung von Lebensmitteln, Umgang mit Medikamenten, Zytostatika und Hormoncremes. Enthält keine Latexproteine und ist daher bei Latexallergien unbedenklich.

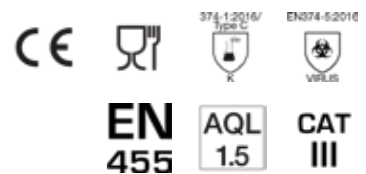

Untersuchungshandschuhe, Abena Classic Sensitive



Art. Nr.	Material	Eigen-schaften	Größe	Farbe	Stk pro Pkg/Pkg pro Karton/ Karton pro Pal
290710	Nitril	Puderfrei	XS	Orange	100 / 10 / 60
290711	Nitril	Puderfrei	S	Orange	100 / 10 / 60
290712	Nitril	Puderfrei	M	Orange	100 / 10 / 60
290713	Nitril	Puderfrei	L	Orange	100 / 10 / 60
290714	Nitril	Puderfrei	XL	Orange	100 / 10 / 60

Elastischer Untersuchungshandschuh, der sich während des Gebrauchs der Handform anpasst und für eine gutes Tastempfinden sorgt. Kann für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden, z. B. Reinigungs-, Pflege- und Labortätigkeiten, Handhabung von Lebensmitteln, Umgang mit Medikamenten, Zytostatika und Hormoncremes. Enthält keine Latexproteine und ist daher bei Latexallergien unbedenklich.





Untersuchungshandschuhe, Abena Classic Sensitive



Art. Nr.	Material	Eigen- schaften	Größe	Farbe	Stk pro Pkg/Pkg pro Karton/ Karton pro Pal
290740	Nitril	Puderfrei	XS	Grün	100 / 10 / 60
290741	Nitril	Puderfrei	S	Grün	100 / 10 / 60
290742	Nitril	Puderfrei	M	Grün	100 / 10 / 60
290743	Nitril	Puderfrei	L	Grün	100 / 10 / 60
290744	Nitril	Puderfrei	XL	Grün	100 / 10 / 60

Elastischer Untersuchungshandschuh, der sich während des Gebrauchs der Handform anpasst und für eine gutes Tastempfinden sorgt. Kann für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden, z. B. Reinigungs-, Pflege- und Labortätigkeiten, Handhabung von Lebensmitteln, Umgang mit Medikamenten, Zytostatika und Hormoncremes. Enthält keine Latexproteine und ist daher bei Latexallergien unbedenklich.



Abena Antimikrobielle Handschuhe

Revolution in der Welt der Infektionsprävention

Abena Antimikrobielle Handschuhe sind die ersten Handschuhe, die ein hohes Maß an antimikrobiellem Schutz bieten und gleichzeitig nicht auslaugen. Sie setzen den Standard für die globale Gesundheits- und Infektionsschutzindustrie.



Antimikrobieller Untersuchungshandschuh, Abena Excellent



Art. Nr.	Eigenschaften	Größe	Farbe	Stk pro Pkg/Pkg pro Karton/ Karton pro Pal
1000010125	Puderfrei, antimikrobiell	XS	Blau	200 / 10 / 54
1000010126	Puderfrei, antimikrobiell	S	Blau	200 / 10 / 54
1000010127	Puderfrei, antimikrobiell	M	Blau	200 / 10 / 54
1000010128	Puderfrei, antimikrobiell	L	Blau	200 / 10 / 54
1000010129	Puderfrei, antimikrobiell	XL	Blau	200 / 10 / 54

Tötet ausgewählte Bakterien zu 99,999 %* ab. Flexibler Untersuchungshandschuh, der sich während des Gebrauchs der Hand anpasst. Geeignet für Aufgaben wie z. B. Reinigungs-, Pflege- und Labortätigkeiten sowie die Handhabung von Medikamenten, Zytostatika und Hormoncremes. Enthält keine Latexproteine und ist daher bei Latexallergien unbedenklich. Der Handschuh tötet Mikroorganismen ab, die mit seiner Außenfläche in Kontakt kommen.
* Testbericht auf Anfrage erhältlich.



Der erste **nicht auslaugende** antimikrobielle Nitrilhandschuh ✓

Bieten **aktiven** Schutz gegen Infektionen ✓

Töten bis zu **99,999 %** der relevanten Bakterien ab ✓

Schließen Sie sich dem Kampf gegen Infektionen an unter www.abena.at

Medizinische Untersuchungshandschuhe aus Latex

Hohe Berührungsempfindlichkeit und Griffsicherheit

- Eine gute Wahl für den medizinischen und schützenden Gebrauch.
- Passen sich wie eine zweite Haut an und ermöglichen eine freie Bewegung der Finger mit hoher Berührungsempfindlichkeit und gutem Griff.
- Bietet Schutz vor Mikroorganismen.
- Flexibel und angenehm zu tragen.



WUSSTEN SIE SCHON

Latexhandschuhe werden aus Naturkautschuk hergestellt, der aus Latexbäumen (Hevea Brasiliensis) in Südostasien gewonnen wird. Latexhandschuhe zeichnen sich durch einen hervorragenden Sitz und hohe Flexibilität aus.



Untersuchungshandschuhe, Abena Classic



Art. Nr.	Material	Eigenschaften	Größe	Farbe	Stk pro Pkg/Pkg pro Karton/ Karton pro Pal
8817	Latex	Puderfrei	XS	Natur	100 / 10 / 50
4387	Latex	Puderfrei	S	Natur	100 / 10 / 50
4388	Latex	Puderfrei	M	Natur	100 / 10 / 50
4389	Latex	Puderfrei	L	Natur	100 / 10 / 50
4381	Latex	Puderfrei	XL	Natur	100 / 10 / 50

Elastischer Untersuchungshandschuh aus Naturlatex-Material mit niedrigem Gehalt an Latexprotein. Gute Passform, die für hohes Tastempfinden sorgt.



Untersuchungshandschuhe, Abena Classic



Art. Nr.	Material	Eigenschaften	Größe	Farbe	Stk pro Pkg/Pkg pro Karton/ Karton pro Pal
4383	Latex	Leicht gepudert	XS	Natur	100 / 10 / 50
4384	Latex	Leicht gepudert	S	Natur	100 / 10 / 50
4385	Latex	Leicht gepudert	M	Natur	100 / 10 / 50
4386	Latex	Leicht gepudert	L	Natur	100 / 10 / 50
4382	Latex	Leicht gepudert	XL	Natur	100 / 10 / 50

Elastischer Untersuchungshandschuh aus Naturlatex-Material mit niedrigem Gehalt an Latexprotein. Gute Passform, die für hohes Tastempfinden sorgt.



Zubehör

Handschuhgestell, Abena Flexi rack



Art. Nr.	Eigenschaften	Breite	Höhe	Stk pro Karton/ Karton pro Pal
490251	Für 1 Spenderkarton	260 mm	197 mm	45 / 16
490252	Für 2 Spenderkartons	260 mm	414 mm	25 / 16
490253	Für 3 Spenderkartons	260 mm	630 mm	10 / 16
490254	Für 4 Spenderkartons	260 mm	830 mm	20 / 6

Geeignet für Spenderkartons mit Handschuhen.

Unserem Credo

„Der Mensch im Mittelpunkt“

folgend arbeiten wir ständig daran, für unsere Kundinnen und Kunden einen Mehrwert zu schaffen.



GEORG EGGER
PRODUKTMANAGEMENT

Herzliche Grüße aus Graz

Personalisierte Gesundheitsversorgung bedeutet für uns seit Firmengründung, die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Als Herstellervertreter von ABENA in Österreich arbeiten wir stets daran, die Mission des dänischen Produzenten österreichweit bestmöglich zu erfüllen. Wir wollen Ihre individuellen Bedürfnisse kennenlernen um gemeinsam mit Ihnen, ausgestattet mit viel Fachwissen und Einfühlungsvermögen, die richtigen Lösungen zu finden. Durch die jahrzehntelange Erfahrung als Anbieter von umfassenden Lösungen im Gesundheitswesen, haben wir ein Produktsortiment zusammengestellt, welches für alle Beteiligten die passenden Produkte bereithält – für den Benutzer, das Pflegepersonal, die Einrichtungsleitung und den Fachhandelspartner.

Wir sind für Sie da!

Unser Pflegeteam besteht aktuell aus 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vier davon sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen. Wir sind regelmäßig in Ihrer Nähe und telefonisch gut erreichbar – eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit steht für uns im Fokus.

- Das Ziel, für unsere Kundinnen und Kunden stets einen Mehrwert zu schaffen, steht im Zentrum unseres Handelns
- Als Herstellervertreter vieler starker Marken, können wir unsere Kundinnen und Kunden umfassend beraten und die besten Lösungen anbieten
- Wir versorgen unsere Kundinnen und Kunden zuverlässig mit hochwertigen, innovativen und preiswerten Produkten

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

www.georgegger.at/abena | +43 316 71 51 68 | info@georgegger.at

Folgen Sie uns auf:



FSC™ (Forest Stewardship Council) ist eine internationale nichtstaatliche Organisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC™ zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen nachhaltig bewirtschafteter Wälder und umweltfreundlicher Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Etiketts wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Mit der Wahl FSC-zertifizierter Produkte helfen Sie, die Wälder sowie die Menschen und Tiere, die in diesen Wäldern leben, zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fsc.org

Abena A/S ist nach den Standards des FSC™ (Forest Stewardship Council) zertifiziert und GEORG EGGER & Co GmbH ist ein Händler von FSC™-zertifizierten Abena-Produkten. Erfahren Sie mehr auf www.abena.com

Ihr Fachhandelspartner in der Region: