


Gebrauchshinweise

Qufora® IrriSedo Bett

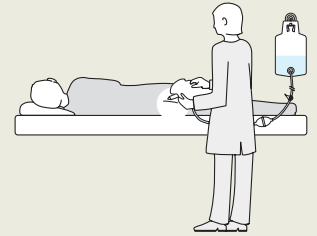

Transanales, geschlossenes Irrigationssystem mit Rektalkatheter, Wasserbehälter mit Handpumpe, Auffangbeutel und Gelsachets.

- 1 Wasserbehälter
- 2 Rektalkatheter
- 3 Handpumpe
- 4 Ventil
- 5 Auffangbeutel



Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Irrigation beginnen.

Sprechen Sie Ihren Arzt oder das einweisende medizinische Fachpersonal an, wenn Sie weitere Fragen haben.

Kontakt

Ihr Herstellervertreter in Österreich
GEORG EGGER
PRODUKTMANAGEMENT
Georg Egger & Co GmbH


Kapellenstraße 105
A-8053 Graz
Tel: +43 (0) 316 71 51 68
Fax: +43 (0) 316 71 51 68 66
www.georgegger.at/qufora

 **Qufora®**
Your life. Our inspiration.

Qufora® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Qufora A/S. © 02/2023. Alle Rechte vorbehalten, Qufora A/S, 3450 Allerød, Dänemark.


Qufora IrriSedo Bett

1

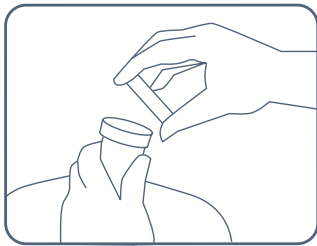


Füllen Sie den Wasserbehälter mit 36-38°C warmen Wasser. Platzieren Sie diesen auf Patientenhöhe (max. 50 cm darüber).

2

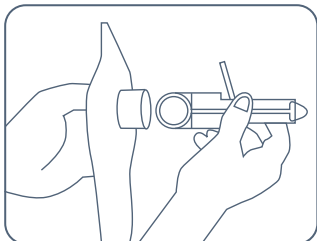


Verbinden Sie den Auffangbeutel mit dem Katheter und eingesteckter Einführhilfe.

3

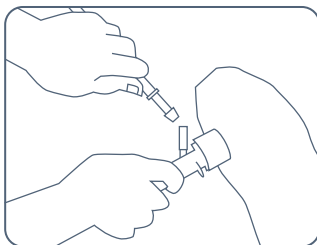


Schließen Sie den Schlauch des Wasserbehälters an den Katheter an.

4

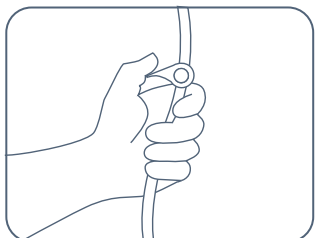


Bitte waschen Sie vor und nach der Irrigation gründlich Ihre Hände. Öffnen Sie das Ventil, um das System mit Wasser zu füllen. Danach schließen Sie es wieder.

5

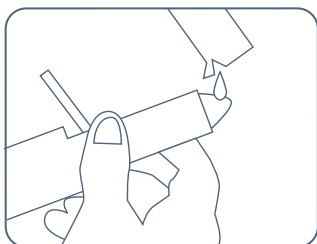


Verwenden Sie bei Bedarf Einmalhandschuhe und bringen Sie auf der Spitze des Katheters ein Gleitmittel auf.

6

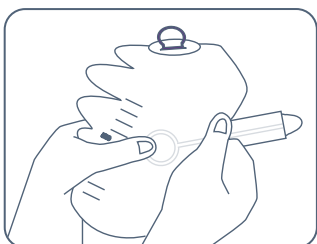


Greifen Sie den Ring der Einführhilfe durch den Auffangbeutel auf Höhe der 500 bis 1000ml-Markierung.

7

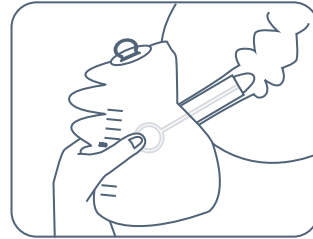


Lagern Sie den Patienten auf der linken Seite und führen Sie den Katheter vorsichtig in das Rektum ein.

8

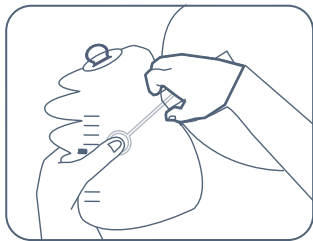


Ziehen Sie die Einführhilfe aus dem Katheter in den Auffangbeutel.

9

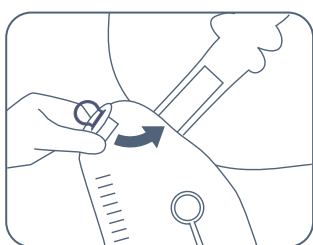


Verschließen Sie den Katheter mit dem Stopfen. Sichern Sie den Katheter während der gesamten Irrigation mit der Hand.

10

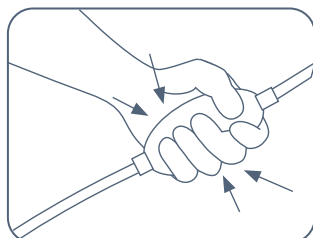


Öffnen Sie das Ventil und spülen Sie Wasser in den Darm. Bei Erwachsenen hat sich eine Wassermenge von 200-500ml bewährt.

11

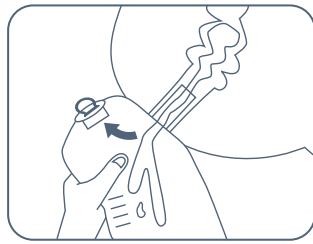

Öffnen Sie nach einigen Minuten den Stopfen im Auffangbeutel. Der Darminhalt wird in den Auffangbeutel geleitet.

12

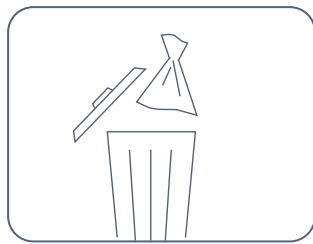

Wiederholen Sie den Spülvorgang bei Bedarf (siehe 9-11). Entsorgen Sie Katheter und Auffangbeutel und trocknen Sie den Wasserbehälter.

Reinigung und Lagerung Entleeren Sie alle Bauteile vom Wasser. Reinigen Sie die Oberfläche des Bett Systems mit einer milden Seifenlauge und Wasser. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und Hitze. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.



Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchshinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit der Irrigation beginnen.