


Gebrauchshinweise

Qufora® IrriSedo Klick

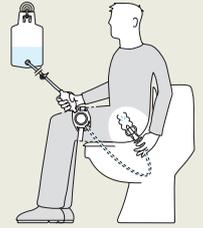

- 1 Wasserbehälter
- 2 Rektalkatheter mit hydrophiler Beschichtung
- 3 Klick-Schlauch
- 4 Handpumpe und Regler

Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Irrigation beginnen.

Sprechen Sie Ihren Arzt oder das einweisende medizinische Fachpersonal an, wenn Sie weitere Fragen haben.

Die Anwendung des Reglers

Das System funktioniert durch das schrittweise Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn.

Die Positionen 1-2-3-4 des Reglers

- 1  Betätigen Sie die Handpumpe, um das System vorzubereiten, zu entlüften und die Schläuche, die Handpumpe und den Katheter mit Wasser zu befüllen.
- 2  Nach Einführen des Katheters in das Rektum, nutzen Sie die Handpumpe zum Befüllen des Ballons.
- 3  Nutzen Sie die Handpumpe oder die Schwerkraft, um Wasser in das Rektum einlaufen zu lassen.
- 4  Entleert den Ballon, damit der Katheter aus dem Rektum entfernt werden kann.

-  Das Drehen des Reglers auf eine der Positionen, die mit einem Punkt markiert sind, stellt das System auf Pause und stoppt den Wasserfluss.

Kontakt

Ihr Herstellervertreter in Österreich
GEORG EGGER
PRODUKTMANAGEMENT
Georg Egger & Co GmbH


Kapellenstraße 105
A-8053 Graz
Tel: +43 (0) 316 71 51 68
Fax: +43 (0) 316 71 51 68 66
www.georgegger.at/qufora

 **Qufora®**
Your life. Our inspiration.

Qufora® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Qufora A/S. © 02/2023. Alle Rechte vorbehalten, Qufora A/S, 3450 Allerød, Dänemark.


Qufora IrriSedo Klick

1

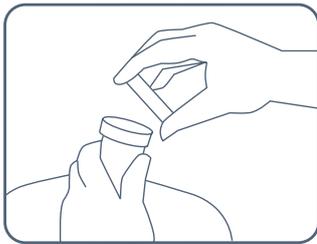


Füllen Sie den Wasserbehälter mit der von Ihrem Arzt festgelegten Menge an körperwarmem Leitungswasser. Hängen Sie den Wasserbehälter in Schulterhöhe (Sitzposition) auf.

2

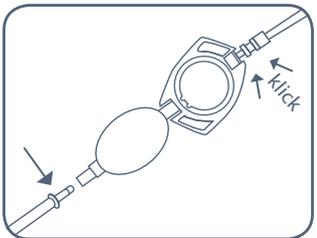


Verbinden Sie den Wasserbehälter mit der Handpumpe. Verbinden Sie den Klick-Schlauch mit dem Regler mittels des Klick-Konnektors.

3

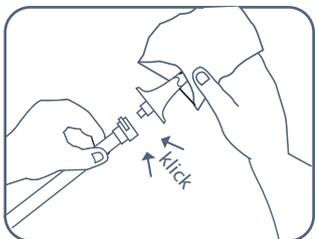

Verbinden Sie das andere Ende des Klick-Schlauches mit dem Katheter mittels des Klick-Konnektors.

4

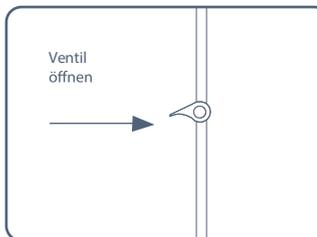


Drehen Sie den Regler in **Position 1**. Öffnen Sie das Ventil an dem Wasserbehälter.

5




Halten Sie die Handpumpe mit dem Regler aufrecht und pumpen Sie einige Male bis Wasser aus dem Katheter herausläuft. Unterbrechen Sie das System durch das Drehen des Reglers zwischen die **Positionen 1 und 2**.

6

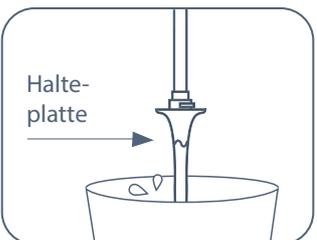


Tauchen Sie den Rektalkatheter vollständig in Wasser, um die hydrophile Beschichtung zu aktivieren.

7

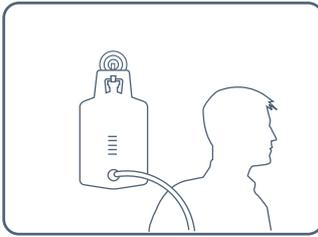


Hängen oder platzieren Sie den Wasserbehälter nicht höher als in Schulterhöhe im Verhältnis zu Ihrer Sitzposition. Jetzt können Sie das Wasser mit der Handpumpe oder mittels Schwerkraft in den Darm laufen lassen.

8

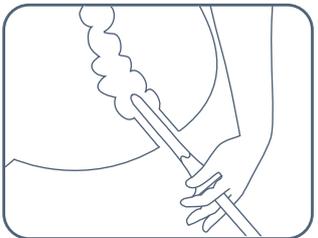

Setzen Sie sich auf oder über die Toilette. Falls gewünscht, befestigen Sie den Regler mit dem Klettband an ihrem Oberschenkel. Führen Sie den Katheter vorsichtig in das Rektum ein.

9

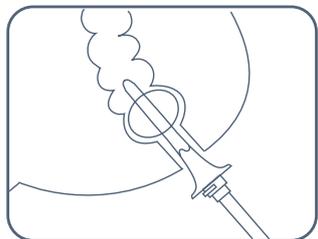


Drehen Sie den Regler auf die **Position 2**. Pumpen Sie ein oder zwei Mal (oder wie von Ihrem Arzt empfohlen), um den Ballon mit Wasser zu befüllen.

10




Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn auf **Position 3**. Nutzen Sie die Handpumpe oder die Schwerkraft, um Wasser in das Rektum einlaufen zu lassen. Für eine Pause stellen Sie den Regler zwischen **Position 3 und 4**.

11

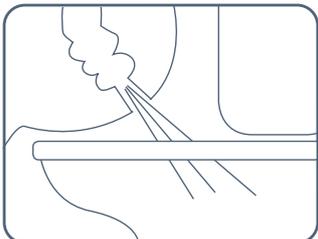

Stellen Sie den Regler auf **Position 4** und schließen Sie das Ventil. Der Ballon entleert sich. Bleiben Sie auf der Toilette sitzen und entfernen Sie vorsichtig den Katheter. Warten Sie, bis sich Ihr Darm entleert hat.

12

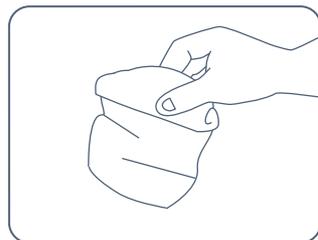

Trennen Sie den Rektalkatheter vom Klick-Schlauch und entsorgen Sie diesen mit Hilfe des Katheterbeutels im Hausmüll.

Reinigung und Lagerung Entleeren Sie alle Bauteile vom Wasser. Reinigen Sie die Oberfläche des Klick Systems mit einer milden Seifenlauge und Wasser. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und Hitze. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.



Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchshinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit der Irrigation beginnen.