

Sauer
Comfort
violett

Neu

... **Sicherheit und
einfache Handhabung**




Das selbstklebende Urinal-Kondom
mit der kurzen Klebezone

Probleme


Bei der Anwendung eines Urinal-Kondoms können unterschiedliche Probleme auftreten, die oft auch mit den Eigenschaften des gewählten Kondoms

zusammenhängen. Um den aufgeführten Problemen entgegenzuwirken, muss ein Urinal-Kondom besonders hohe Anforderungen erfüllen.

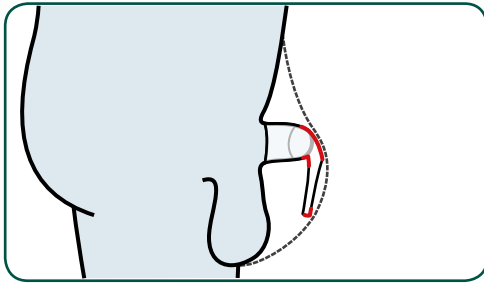


Reibung

Kondome ohne flexible Pufferzone können an der Kleidung reiben, was zu einem vorzeitigem Ablösen des Kondoms führen kann.

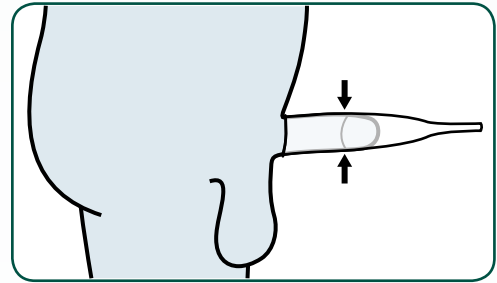


Keine passende Größe

Schlecht angepasste Kondome ermöglichen meist keine sichere Klebeverbindung.

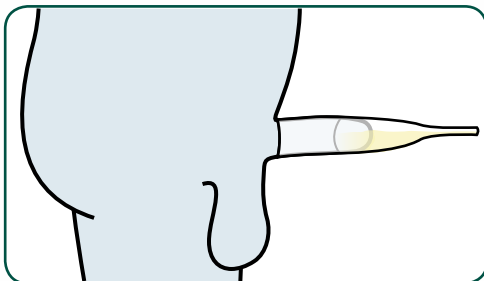

Pfützenbildung

Bei Kondomen aus festerem Material bleibt häufig ein Urinrest im Kondom zurück.

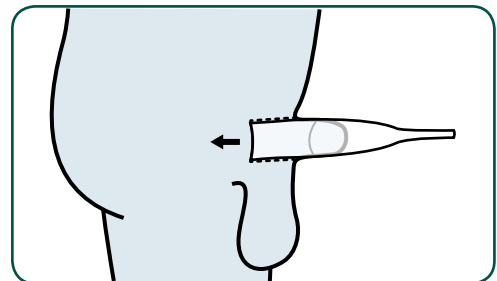


Retrahierter Penis

Der Penis zieht sich in den Bauchraum zurück, wodurch weniger Klebefläche zur Verfügung steht.

SAUER-Comfort – Violett


Aus eigener Entwicklung und Produktion. Die Kondome werden in unserem Betrieb in Lobbach hergestellt und haben die Merkmale, die für den Anwender entscheidend sind, wenn es um einfache Handhabung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und nicht zuletzt um einen hohen Tragekomfort geht.

Beim Urinal-Kondom SAUER-Comfort – Violett ist die Klebezone deutlich verkürzt, was vor allem Anwendern mit wenig Klebefläche, aber ohne schwallartige Blasenentleerung entgegenkommt. Wegen der kurzen Form ist dieses Kondom in den kleinen Größen auch für Kinder geeignet.

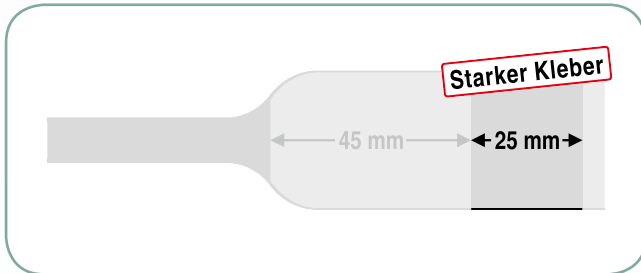


Kurze Klebezone

Bei einer kleinen Klebefläche ist eine kurze Klebezone vorteilhafter, weil am Ende des Kondoms kein klebriger Ring verbleibt, der sonst mit der Unterwäsche verkleben könnte. Dafür ist der Kleber stärker ausgelegt und sorgt für eine sichere Klebeverbindung. Im Bereich der Klebezone ist das Kondom transparent, um das Hautbild beobachten zu können, ohne das Kondom abzulösen.

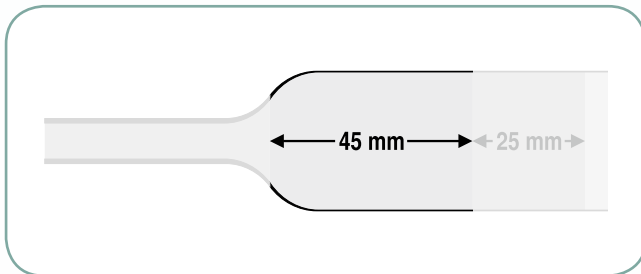

Pufferzone

Ermöglicht ein enges Anlegen des Kondoms an den Körper. So wird ein Reiben zwischen Unterwäsche und Kondom, das zum Ablösen des Kondoms führen könnte, weitgehend vermieden. Der Schlauch zum Urin-Auffangbeutel kann beliebig nach links oder rechts gelegt werden.

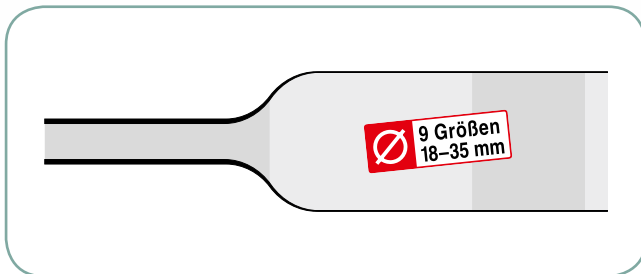

9 Größen

Durch die fein abgestuften Größen (Durchmesser 18–35 mm) ist eine exakte Anpassung möglich. Je höher die Passgenauigkeit des Kondoms, umso sicherer ist die Klebeverbindung.


SAUER-Comfort – selbstklebende Urinal-Kondome

Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und Bettbeutel mit und ohne Adapter. In 9 Größen erhältlich.

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Urinal-Kondome – SAUER-Comfort – Violett

Länge 75 mm, Pufferzone 45 mm, Klebezone 25 mm, starker Kleber

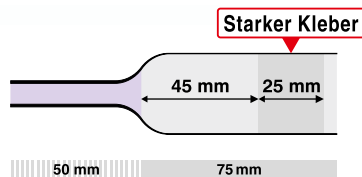

Ø mm	Best.-Nr.
18	97.4511.18
20	97.4511.20
22	97.4511.22
24	97.4511.24
26	97.4511.26
28	97.4511.28
30	97.4511.30
32	97.4511.32
35	97.4511.35



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de

2015-10 XD